

SILENT KNIGHT® Pilleknuser

Silent Knight både knuser og maler pillerne, så resultatet bliver et ensartet, fint pulver, der er let at blande op i f.eks. yoghurt eller sondeernæring.

Enkel, sikker og effektiv måde at knuse piller fra fast til fint pulver. Når du følger nedenstående trin og procedure, er det muligt at knuse en enkelt pille eller flere piller hurtigt og effektivt.

Sådan bruger du

1. Placer pille(r) i **Silent Knight Pillenuser Poser**. Løft håndtaget og læg posen ned mellem knuserpladerne for at starte knusningen.



2. Tryk håndtaget ned for at knuse pille(r). Løft håndtaget og træk pose opad til midten af knuserpladerne.



3. Tryk derefter håndtaget ned for at aktivere slibebevægelse. Tryk håndtaget ned flere gange for at male piller til fine pulver. Gentag om nødvendigt.



4. Fjern posen og tilsæt medicinen til et passende serveringsmedium til administration.



[Se instruktionsfilmen](#) ➡

Bemærk: Ingen anden pilleknuser pose fungerer effektivt og sikkert i Silent Knight. Brug af en hvilken som helst anden pillepose vil kompromittere produktets ydeevne og resultat.