

# 3M


# Cavilon™

Skin Care Solutions



## 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse


### Påføring omkring en stomi eller fistel.\*

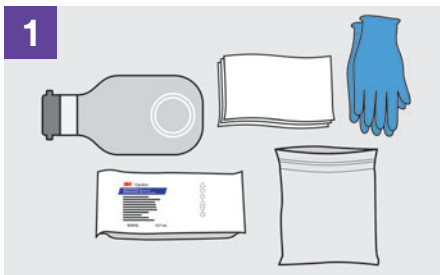

1


**Placer tilbehøret** på en ren overflade med let adgang til patienten. Forbered de nødvendige stomiprodukter.

- ▶ Bløde, fnugfri klude/papirservietter fugtet med varmt vand, ekstra klude efter behov til at opsuge afføring/urin
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse 0,7 ml applikator
- ▶ Undersøgelseshandsker
- ▶ Stomipose, andet stomitilbehør (f.eks. stomipasta, barrierestrimler) efter behov
- ▶ Plastikpose eller -beholder til bortskaffelse af affald

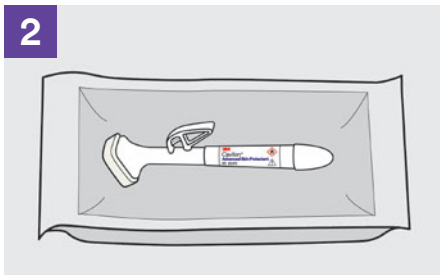


2

**Åbn pakken** med Cavilon Advanced hudbeskyttelse, og lad applikatoren blive i plastikposen.

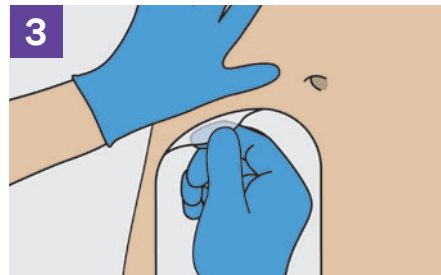

3


**Positioner patienten**, og fjern stomiposen/pladen.

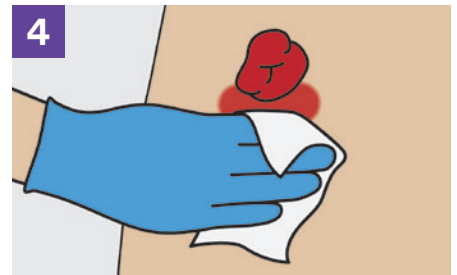

4


**Rengør forsigtigt huden** for at fjerne afføring/urin eller rester af stomipasta eller barrieremateriale. Tør forsigtigt efter behov.

- ▶ Ved overfladisk hudtab er det ikke nødvendigt at påføre stomipudder før påføring af Cavilon Advanced hudbeskyttelse
- ▶ Hvis huden skal beskyttes rundt om en slange, et dræn eller en enhed, skal huden rengøres for at fjerne eventuel resterende salve/creme/pasta

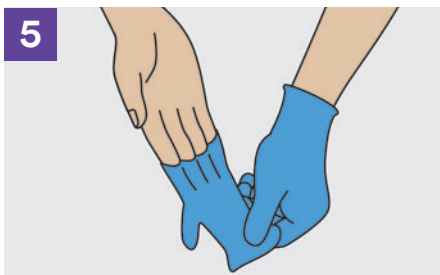

5

**Skift handsker.**

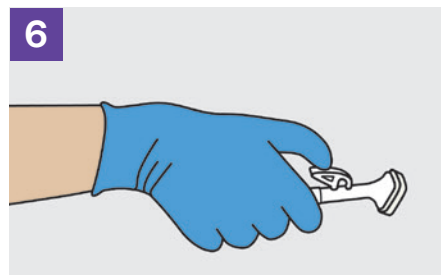

6

**Tag fat i applikatoren**, og placer tommelfingeren for enden af grebet.



7

**Peg svampen på applikatoren nedad**, og tryk grebet ned med et fast greb for at bryde den indvendige ampul.

\*Instruktionerne i denne vejledning kan også følges ved påføring af Cavilon Advanced hudbeskyttelse til hudbeskyttelse omkring en slange, et dræn eller en enhed.

- ▶ Du kan høre et lille knæk eller smæld, når ampullen brydes



**Hold applikatoren nedad i ca. 10 sekunder, så væsken kan trænge ind i skumsvampen.**

- ▶ Væsken flyder ved hjælp af tyngdekraften, så du behøver ikke at holde trykket på grebet
- ▶ Væsken mætter ikke svampen fuldstændigt ud til kanterne



**Pres skumsvampen let mod huden, og påfør væsken på et område, der er blødt og/eller kan blive eksponeret for afføring/urin i løbet af posens anvendelsestid. Før skumsvampen over det påvirkede område, så der dannes en tynd, jævnt dækkende film med minimal overlappning. På små områder kan du påføre produktet med forsigtig overførsel.**

**Bemærk:** Grebet må ikke presses ned under påføringen. Dette kan medføre ophobning af væske og overdreven klæbrighed.


- ▶ Fortsæt påføringen, indtil hele det pågældende område er dækket
- ▶ Mal ikke frem og tilbage over det samme område under påføringen

**Bemærk:** Yderligere instruktioner ved brug af den store applikator (2,7 ml) til områder, der er mindre end et A4 ark:

- ▶ Efter aktivering af applikatoren skal du presse noget af væsken ud på bagsiden af den øverste hvide del af pakken
- ▶ Påfør produktet på patientens hud



**Lad produktet tørre i mindst 60 sekunder, før du sætter stomiposen eller pladen på.**

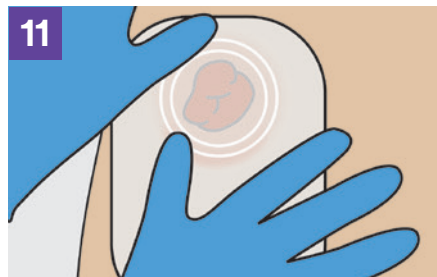

**Sæt posen eller pladen på i henhold til producentens anvisninger.**

**For hudbeskyttelse omkring stomier eller fistler skal Cavilon Advanced hudbeskyttelse påføres igen ved hvert poseskifte.**

- ▶ Hvis der ikke er en pose på det påvirkede område, skal produktet påføres 2–3 gange om ugen
- ▶ Ved efterfølgende poseskift bruges en adhæsivfjerner (indeholdende hexamethyldisiloxan (HMDS) eller en siloxan) hver gang, du fjerner et adhæsivt produkt fra huden, som har været dækket af Cavilon Advanced hudbeskyttelse

**For hudbeskyttelse omkring slanger, dræn eller enheder skal produktet påføres igen 2–3 gange om ugen.**

## Bestillingsinformation

3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse

Kat. nr.	Størrelse	Stk./æske
5050G4P	2.7 ml applikator	4
5050G	2.7 ml applikator	20
5051G4P	0.7 ml applikator	4
5051G	0.7 ml applikator	20

Hvis du har spørgsmål vedrørende påføringen af 3M™ Cavilon™ Advanced hudbeskyttelse, kan du kontakte din lokale 3M-repræsentant eller besøge **3M.dk**