



Hurtigguide nal von minden Drug-Screen®

Multi 12C Test


Hurtigtest for urinanalyse

nal von minden Drug-Screen® Multi 12C urin-dyppstest kan påvise følgende parametre


Parameter	Forkortelse	Grenseverdi	Parameter	Forkortelse	Grenseverdi
Amfetamin	AMP	300	Metamfetamin	MET	300
Buprenorfin	BUP	10	Morfin/opiater	MOR/OPI	300
Benzodiazepiner	BZD	300	Metadon	MTD	300
Kokain	COC	300	Oksykodon	OXY	100
Fentanyl	FYL	10	Cannabinoider	THC	50
Ecstasy	MDMA/XTC	500	Tramadol	TML	100

I tillegg til testkassetten trengs en innsamlingskopp for urinprøven, beskyttelseshansker og en stoppeklokke for at utføre testen.


Testprosedyre

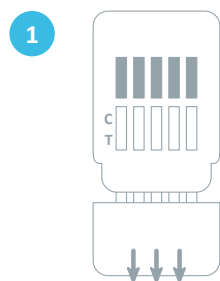

1 Ta ut testen fra posen og fjern deretter beskyttelseshetten.

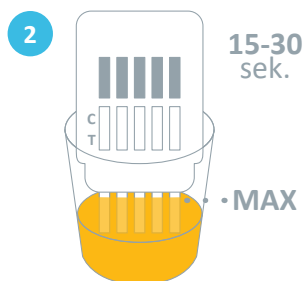

2 Senk teststrimlene ned i urinprøven i 15-20 sekunder, så dypt som markeringen viser (MAX) Væsken må ikke overstige MAX-markeringen.

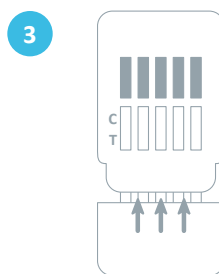

3 Sett tilbake beskyttelseshetten. Start tidtakeren.



4 Resultattolkning: Les av resultatet av rustesten etter 5 minutter. Ikke les resultatet etter mer enn 8 minutter.



En detaljert forklaring finner du i pakkvedlegget.

Resultattolkning

