


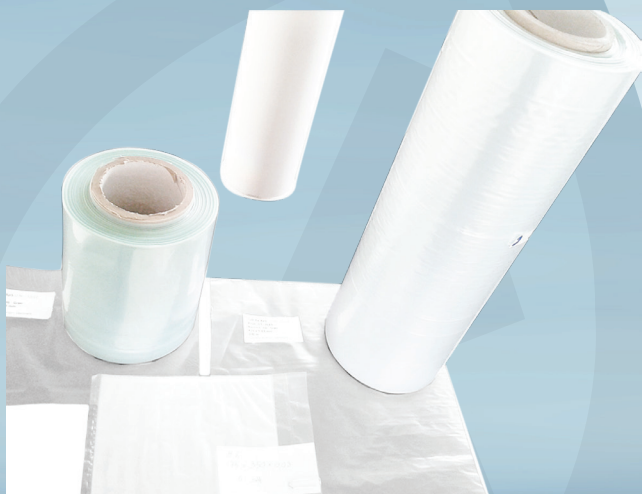

Varenummer 1999917579

Rørfolie, Amilin, 200m x 5cm, H6, til tørsterilisation

Produktbeskrivelse

Rørfolie anvendes til indpakning af instrumenter inden sterilisation i tørsterilisator. Instrumenterne skal rengøres og desinficeres inden de pakkes i rørfolien. Rørfolien lukkes med tørsteriliseringstape eller ved hjælp af svejsemaskine. Anbefalet steriliseringstid 160^o celsius i 2 timer, tidsrummet er at regne fra den angivne temperatur i sterilisatoren er opnået. Rørfolien kan anvendes i temperatur intervallet -40°C - 180°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rørfolie
Varemærke	Amilin
Features	H6, til tørsterilisation
Længde/dybde	200 m
Bredde	5 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.5 cm	16.5 cm	6.5 cm	