



Varenummer 1999917581

Rørfolie, Amilin, 200m x 10cm, H6, til tørsterilisation

Produktbeskrivelse

Rørfolie anvendes til indpakning af instrumenter inden sterilisation i tørsterilisator. Instrumenterne skal rengøres og desinficeres inden de pakkes i rørfolien. Rørfolien lukkes med tørsteriliseringstape eller ved hjælp af svejsemaskine. Anbefalet steriliseringstid 160^o celsius i 2 timer, tidsrummet er at regne fra den angivne temperatur i sterilisatoren er opnået. Rørfolien kan anvendes i temperatur intervallet -40°C - 180°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rørfolie
Varemærke	Amilin
Features	H6, til tørsterilisation
Længde/dybde	200 m
Bredde	10 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	16 cm	11 cm	