



Materialevenlige rense- og desinfektions-servietter imprægneret med en lav-alkoholholdig opløsning til hurtig aftørring.

mikroZID® universal wipes green line

Vores fordele:

- 100 % plastikfri servietter
- Meget bæredygtig og klimaneutral
- Maksimal materialekompatibilitet
- Virker på få sekunder
- Dermatologisk testet

Anvendelsesområder

Produktet er velegnet til desinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr og andre overflader. Vores alsidige desinfektionsservietter er også velegnede til desinfektion af følsomme kommunikationsenheder. Smartphones og tablets med hyppig håndkontakt kan eksempelvis behandles med mikroZID® universal green line uden risiko for skade på enhederne.

Brugsanvisning

Tør overfladen grundigt af med kluden og lad desinfektionsvæsken virke. Sørg for fuldstændig fugtning af overfladerne. Sørg for, at alt synligt snavs er fjernet før desinfektion. Behandl kun små områder. Arealet, der kan behandles, afhænger af rumtemperaturen og af strukturen på den overflade, der skal desinficeres. Overhold hygiejneaspekter, når du åbner pakken. Sørg for, at låget lukkes efter brug.

I tilfælde af adenovirus og Mycobacterium tuberculosis skal overfladen holdes våd under hele kontakttiden.

Kun til professionel brug. Alle alvorlige hændelser relateret til produktet skal rapporteres til fabrikanten og den kompetente myndighed. Ikke beregnet til slutdesinfektion af semi-kritisk og kritisk medicinsk udstyr. Produktet kan også bruges uden handsker, hvis det ikke kræves af sikkerhedsdatabladet for infektionsbeskyttelse og arbejdssikkerhed.

Microbiologisk effekt

Effektivitet	Koncentration	Kontakttid
bakteriedræbende i henhold til VAHs retningslinjer med korte kontakttider - beskidte forhold	klar til brug	2 min.
bakteriedræbende EN16615 - rene forhold	klar til brug	1 min.
bakteriedræbende EN13727 - beskidte forhold	klar til brug	15 sek.
tuberkulicid EN14348 - rene forhold	klar til brug	5 min.
gærdræbende EN13624 - beskidte forhold	klar til brug	1 min.
gærdræbende EN16615 - rene forhold	klar til brug	1 min.
virusdræbende mod kappebærende vira EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	15 sek.
begrænset spektrum af virusdræbende virkning EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	15 min.
Norovirus EN14476 - rene forhold	klar til brug	30 sek.
Norovirus EN14476 - beskidte forhold	klar til brug	60 sek.
Polyoma SV40	klar til brug	15 sek.
Rotavirus EN14476 - rene forhold	klar til brug	15 sek.

Certifikater



mikrozid® universal wipes green line

Produktdata

Sammensætning:

100 g opløsning indeholder følgende aktive stoffer:

17,4 Propan-2-ol, 12,6 g Ethanol (94 % w/w)

Mærkning i henhold til (EF) nr. 648/2004: < 5 % anioniske overfladeaktive stoffer.

Særlige råd:

Brug desinfektionsmidler sikkert.

Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

Produktet er yderst kompatibelt med materialer som metaller og plast (undgå anvendelse på akrylglas og alkohol-følsom lak). Ved brug af alkoholholdige desinfektionsmidler skal du følge Arbejdstilsynets AT-vejledning: Arbejde med brandfarlige væsker. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Yderligere oplysninger er tilgængelige ved henvendelse. Med passende håndtering garanterer schülke en holdbarhed på en måned efter åbning af emballagen

Følgende størrelser er tilgængelige:

- mikrozid® universal vådservietter greenline (6X114 servietter 18 X20 cm)

Relateret produkt

- mikrozid® sensitive wipes

Miljøoplysninger

schülke fremstiller produkter økonomisk og med avancerede, sikre og miljøvenlige produktionsmetoder, samtidig med at vores høje kvalitetsstandarder opretholdes.

Ekspertudtalelse og information

Besøg vores hjemmeside for en oversigt over al til gængelig litteratur / rapporter om produktet: www.schuelke.com

For individuelle spørgsmål:

Kundeservice

telefon +45 70 266 244

info.wetwipe@schuelke.com

Information til bestilling

Vare	Leveringsform	Varenr.
mikrozid universal-vådservietter green line Softpack (114)	6 / karton	efter anmodning



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1, German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medical products.

schülke headquarter
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt,
Germany
Phone +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Dansk distributør
Wet Wipe A/S
Vallensbaekvej 65
2625 Vallensbaek
Denmark
Phone +45 70 266 244
Fax: +45 70 266 233
www.wetwipe.eu
info.wetwipe@schuelke.com