

Produktbeskrivelse

Urinposeholder er fremstillet i en elastisk Øko-Tex tekstil (95% bomuld og 5% Lycra). **CARE** urinposeholder bæres på enten højre eller venstre underben (læg) og giver brugeren en komfortabel hjælpebeklædning til at fæstne kateterposen i uden at stramme. Findes i 3 størrelser (se nedenstående størrelsesangivelse). Benposen kan vaskes ved 90°C.

Brugsanvisning

Placer urinposeholderen på underbenet. Sørg for at den brede støtteelastik øverst på poseholderen er placeret lige over knæledet, så knæet fortsat har en fri bøjefunktion i kraft af slidsen mellem støtteelastikken og selve poseholderen. Herefter placeres kateterposen i "lommen" på urinposeholderen. Sørg for at aftapningsstudsens føres ud igennem studsåbningen på urinposeholderen, så der er let adgang til efterfølgende at tømme katerposen for væske.

Når urinposeholderen skal skiftes ud med en ren skal kateterposen blot tages ud af "lommen" først og der kan skiftes til en ny urinposeholder.

Art.nr.

Størrelsesangivelse

104XS	CARE urinposeholder extra small * omkreds på læg: minimum 28 cm, maximum 38 cm * omkreds på ankel: minimum 20 cm, maximum 32 cm
104S	CARE urinposeholder small *omkreds på læg: minimum 30 cm, maximum 40 cm *omkreds på ankel: minimum 22 cm, maximum 34 cm
104M	CARE urinposeholder medium *omkreds på læg: minimum 34 cm, maximum 42 cm *omkreds på ankel: minimum 24 cm, maximum 36 cm
104L	CARE urinposeholder large *omkreds på læg: minimum 36 cm, maximum 44 cm *omkreds på ankel: minimum 26 cm, maximum 38 cm
104XL	CARE urinposeholder extra large * omkreds på læg: minimum 40 cm, maximum 50 cm * omkreds på ankel: minimum 28 cm, maximum 42 cm