

Askina® DresSil Border Hæl

Skumprodukt med silikone klæber

Indikation

Sår på hælen, hvor der er behov for en klæbende bandage:

- Væskende overfladiske til dybe sår på hælen
- Diabetiske fodsår
- Tryksår, grad 1 – 4
- Kirurgiske sår
- 1. og 2. grads forbrændinger

Egenskaber

- Selvhæftende skumbandage
- God absorptions kapacitet
- Beskytter sart hud
- Nedsætter smerte og traume ved bandageskift
- Maserations risiko minimeres
- God og sikker tilhæftning til såret samt tilpasning til hudens konturer og folder
- Anatomisk design så den passer til hælen
- Mulighed for repositionering
- Hypoallergisk


Produktbeskrivelse

- Skumbandage med en selvhæftende silikoneklæber på den ene side og en semipermeabel film på den anden
- Blomstermønster i silikoneklæber på 3-5 mm huller, hvilket giver en hurtig og sikker transport af vævsvæske til skumbandagen uden risiko for maseration



Brugsvejledning

1. Fjern det transparente beskyttelses-papir fra de to "ører". Anbring forsigtigt bandagen på hælområdet.
2. Dæk anklerne med "ørerne" af bandagen. Fjern det sidste transparente beskyttelses-papir.
3. Påsæt den nederste del af bandagen på hælen.

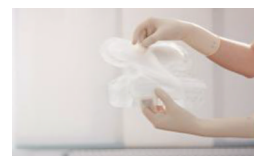

Varenr.	Produktnavn	Størrelse	Salgsenhed
5592205	Askina® DresSil Border NYHED	22 x 21,6 cm	5 stk./æske

Askina® Hæl

Ikke klæbende hælbandage med ankelrem

Indikation

- Sår på hælen, hvor der er behov for en ikke-klæbende bandage:
- Væskende overfladiske til dybe sår på hælen
 - Diabetiske fodsår
 - Tryksår, grad 1 – 4
 - Kirurgiske sår
 - 1. og 2. grads forbrændinger

Egenskaber

- Innovativt anatomisk design, der dækker maleolen/anklen
- God beskyttelse mod friktion og shear forskydninger
- Trykafastende skum. Hjælper med at forebygge tryksår grad 1
- Klar til brug – der er ikke brug for ekstra fiksering
- Ankelremmen kan placeres individuelt. Kan åbnes og lukkes mange gange
- Mulighed for at besigtige såret uden at gå på kompromis med patientens komfort
- Tillader mobilisering

Produktbeskrivelse

- Anatomisk facon
- 2-lags ikke klæbende skumbandage
- Ankelrem samt to selvhæftende burrestykker, der tillader individuel placering
- Blødt hydrofilt polyurethanskum med en semipermeabel film yderst
- Findes i en størrelse



Brugsvejledning

1. Placer de to burrestykker på hver side af Askina® Hæl.
2. Anbring forsigtigt bandagen på hælområdet, og fiksér remmen
3. Korrekt placering af Askina® Hæl: Anklen er dækket.
4. Bandagen kan også fikseres sammen med en kompressionsstrømpe.



Varenr.	Produktnavn	Størrelse	Salgsenhed
7240105	Askina® Hæl	Overflade=225cm ²	5 stk./æske