

ULTRASAN[®]

Optimeret rengøring med enzymer og detergent

Produktbeskrivelse:

ULTRASAN[®] er et koncentreret instrumentrensemiddel med enzymer, og ekstra højt indhold af protein nedbrydende enzym.

ULTRASAN[®] anvendes til neddypning og henstands rengøring af instrumenter, kontamineret med organisk materiale fra mennesker og dyr.

Fordele

ULTRASAN[®] er et særdeles effektivt rengøringsmiddel, idet produktet nedbryder biofilm og herved bringer de gemte bakterier i kontakt med desinfektionsmidlet.

ULTRASAN[®] virker ved neutral pH værdi. Dette gør produktet velegnet til længerevarende henstandsrengøring af instrumenter.

Anvendelsesområder:

- Sygehuse og klinikker
- Tandlæger
- Dyreklinikker
- Piercing, tatovører
- Laboratorier, biotekvirksomheder

Eksempler på anvendelse:

- Rengøring af kanyler, knive, sakse, pincetter, kamme, barberknive etc.
- Rengøring af små vand- og rørsystemer

Fremgangsmåde:

Instrumenter lægges i et stort kar eller ultralydsbad fyldt med 2% Ultrasan. Ultrasan fortyndes med hanevand. For optimal

rengøring udføres rengøringen ved 20 °C i ca. 5 min. instrumentet skylles med rent vand og aftørres med sprit efterfølgende.

Dokumentation for effekt

Testet på Hillerød og Hvidovre Hospital for rengøringseffekt. Produktet leveres med batchnummer og udløbsdato.

Dosering:

Dosering af ULTRASAN[®] er altid 2,0 %.

Holdbarned:

1 ½ år ved stuetemperatur. Holdbarheden skal ses som vejledende idet proteinase enzymet er selvnedbrydende, og nedbrydningen accelereres ved høje stuetemperaturer over 30 °C.

Deklaration:

Rengøringsmiddel til professionelt brug:

Nonioniske tensider > 5 %, < 15 %

Propyleneglykol > 5%, < 15%; fedtopløser, enzym stabilisator.

Protein og stivelsesnedbrydende enzym < 5 %
CaCl₂ < 5%; stabilisator

Triethanolamineborat > 5%, < 15%, stabilisator
konserveringsmiddel

Varenummer: 830302, karton med 6 flasker á 1 liter.