


Før du bruger en mundplejepind!


Tjek at skum delen sidder korrekt fast på pinden.

Patientsikkerheden er vigtig. Ethvert objekt der placeres i munden, kan udgøre en potentiel kvælningsrisiko. Derfor bedes du, som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, læse denne information grundigt igennem, før brug af produktet.

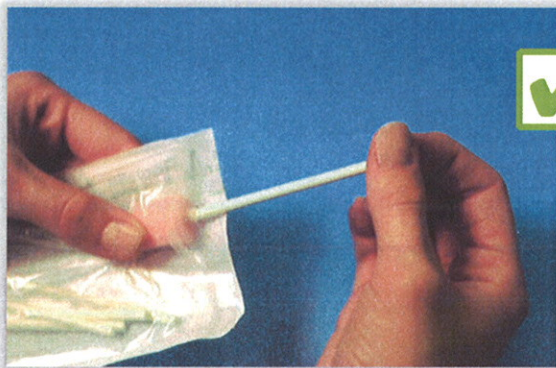

Åben posen, træk en pind lidt ud, af posen, tag fat i skum delen mens denne stadig er beskyttet af posen. Træk forsigtigt i pinden. Kan pinden trækkes af skum delen, må produktet ikke benyttes og skal bortskaffes.

Alternativt, kan der benyttes handsker for at tjekke at skum delen sidder korrekt fast på pinden.

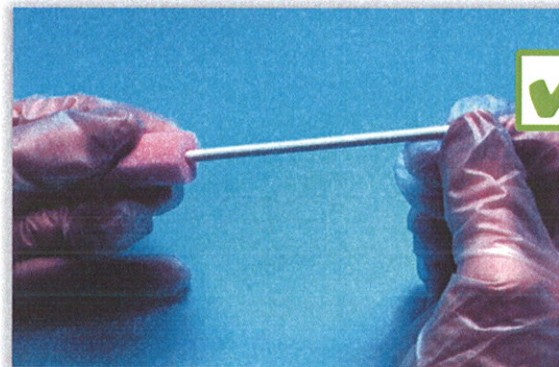

BEMÆRK: Skum delen må ikke placeres i en skål med væske over længere tid, da væsken kan blødgøre pinden og derved løsne skum delen fra pinden.

Produktet er engangs og bortskaffes efter brug.

Er du ikke selv brugeren/behandleren, bedes denne information videregivet til den/de relevante personer - Tak.