

ANVENDELSE AF LUKKET FORMALINSYSTEM - TIL FIKSERING AF SMÅ VÆVSPRØVER

Klargøring af systemet :



1. Find det nye, ubrugte formalinsystem frem, som skal anbringes i holderen.
2. Kontrollér, at systemet er tæt og fri for skader.



3. Anbring formalinsystemet i holderen.
4. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket), se billede nedenfor.

Anvendelse af systemet:



1. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket).



2. Tag engangs-handsker på (nitrilhandsker er de bedst egnede).



3. Kontrollér, at væsken i formalinsystemet er farveløs, klar og gennemsigtig. Ved det mindste tegn på uklarhed eller misfarvning: KASSÉR STRAKS SYSTEMET, se "Affald".




4. Skru låget af, kom din prøve i glasset og træk stemplet lidt ned.



5. Skru låget på.



6. Sæt glasset op i adapteren. HUSK at dreje glasset 2-3 mm mod uret til det sidder fast. Glasset skal nu kunne hænge af sig selv.

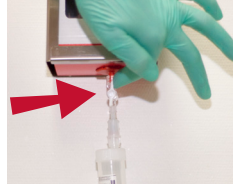

7. Åbn hanen og sug formalin ned til prøven. HUSK, at der ALTID SKAL være luft tilbage i toppen af glasset.



8. Luk hanen igen. (Er der ikke nok formalin i glasset, kan stemplet trykkes lidt op, og yderligere formalin kan suges ned i glasset).



9. Drej glasset 2-3 mm med uret og tag det af adapteren.



10. Kontrollér, at hanen er vandret (lukket).
11. Tag engangs-handskerne af og kassér dem, se "Affald".

Klargøring af prøver til forsendelse:



1. Knæk stemplet af.
2. Mærk prøven med patientdata o.lign. som sædvanligt.
3. Send prøven af sted til analyse jf. arbejdspladsens procedurer for forsendelse af diagnostiske prøver.