



Varenummer 212305

Mundrensepind, 15cm, tør, med skumgummi, omkreds ca. 5,2x2,3cm, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til pleje af tænder, slimhinde og tunge. Skal vædes med eksempelvis dansk vand inden plejen udføres. Kan endvidere benyttes til stimulering af mundhulen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mundrensepind
Features	Tør, med skumgummi, omkreds ca. 5,2x2,3cm
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Skumgummi, PS
Længde/dybde	15 cm
Tykkelse	2.3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	36 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Fugt skumdelen før pleje i munden. Kontrollér inden brug, at skumhovedet sidder rigtigt fast på pinden. Husk at tage medicinske handsker på inden brug af mundrensepinden. Hold pinden fast med den ene hånd og skumhovedet med den anden. Hvis skumhovedet ikke sidder rigtigt fast på pinden, skal mundrensepinden omgående bortskaffes. Efterlad ALDRIG mundrensepinden i væske inden brug, da dette kan påvirke skumhovedets fastgørelse til pinden. Brugte mundrensepinde bortskaffes efter brug.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 pk	21.5 cm	14.6 cm	17.6 cm	25706556011567
pk	5 stk	20.5 cm	8.5 cm	1.8 cm	5706556011563



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.