

Produktinformation:


CODAN Blandingssæt

Til håndtering og administration af antibiotika i lukket system


MONO SÆT	Prod. nr. 251065	1 sidegren
DUO SÆT	Prod. nr. 251100	2 sidegrene
QUADRO SÆT	Prod. nr. 763057	4 sidegrene

- Lukket infusionssystem til opblanding af antibiotika fra hætteglas.
- Udluftningsventil med 0,2 micron filter.
- Dråbekammer med 15 micron filter.
- Patenteret rulleklemme for præcis dosering.
- Standard infusionsslange, PVC NO DEHP. Mål i.d. 3,0 mm og y.d. 4,1 mm.
- Mono- og Duo sæt fås også PVC frit.
- Standard han-luer lock der sikrer en sikker tilslutning til I.V. kanyle.
- Priming volumen, patientslange incl. dråbekammer til niveauring: 16 ml.
- Priming volumen, dråbekammer til niveauring: 5 ml.
- Leveres i kartoner á 100 stk.


Monosæt

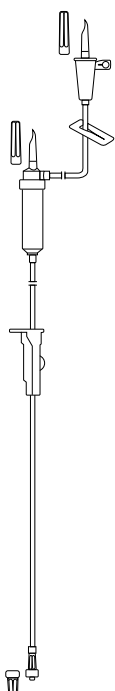

Duosæt

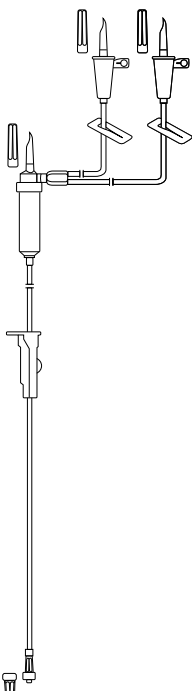

Quadrosæt

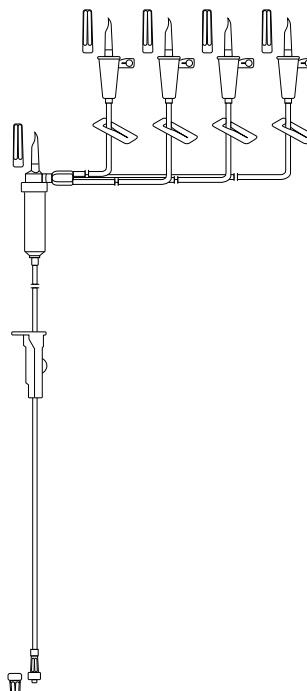

Brugsanvisning:

Monosæt

Brugsanvisning: Monosæt

1. Luk rulleklemmen og glideklemmen
2. Tilslut dråbekammeret til infusionsposen
3. Fyld dråbekammer halvt – til niveauring
4. Åben blå rulleklemme – fyld infusionsslangen

NB: Anvendes sterilt vand til opløsningen, fyldes kun dråbekammeret.

Opløsning af tørstof i hætteglas:

1. Stik spike på sidegrenen gennem gummimembranen på hætteglasset
2. Åben glideklemmen på sidegrenen
3. Løft infusionsposen op over hætteglasset – fyld hætteglasset halvt
4. Luk glideklemmen på sidegrenen
5. Opløs tørstoffet med cirkelbevægelser – ryst ikke glasset



NB! Ved sterilt vand, tømmes hætteglasindholdet først over i posen med NaCl efter fyldning af patientslangen med NaCl.

Overførsel af antibiotika fra hætte glas til infusionspose:

1. Læg infusionsposen på bordet
2. Åben glideklemmen på sidegrenen
3. Løft hætteglasset, med bunden i vejret, op over infusionsposen
4. Kontroller at hætteglas og sidegren er tømt
5. Luk glideklemmen

Infusion:

1. Vend infusionsposen et par gange, lad hætteglasset forblive på sidegrenen
2. Tilslut patientslangen til venekanylen
3. Ved hjælp af blå rulleklemme indstilles infusionshastigheden
4. Lad infusionssettet løbe tomt
5. Fjern og bortskaf sættet incl. hætteglas

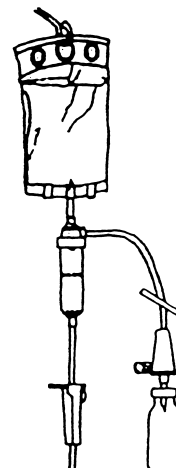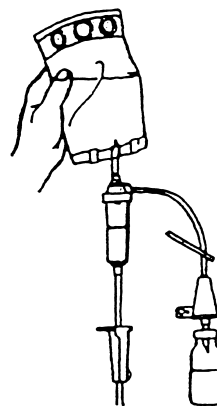

Brugsanvisning:

Duo- og Quadrosæt

Proceduren er den samme som ved monosæt.

Efter påsætning af hætteglas og opløsning af tørstof, kan man inden tilbageførsel til infusionsposen, vælge at påsætte hætteglasset på den næste sidegren – foretage opløsning her – etc.

Hvis kun den ene gren anvendes til antibiotika, er det med Duosæt muligt at ”skylle” efter med gren nr. 2. Efter endt infusion med antibiotika blanding, kan gren nr. 2 anvendes til fortsat infusion med fx. NaCl. Sidegrenen man ønske at skylle med skal være primet forinden med NaCl: Hvordan? – Når man begynder med at prime sættet, åbnes glideklemmen på den gren, der skal anvendes til skylning, når grenen er fyldt, lukkes glideklemmen. Man går herefter videre med opblanding med gren nr. 1.

Gælder også for Quadrosæt.

Kontaminering af omgivelser med aerosoler forhindres grundet udluftningsventil på sidegren spike med 0,2 micron filter.

CODAN produktsortiment

- Infusionsustyr
- Tranfusionsudstyr
- Tilbehør til infusions- og transfusionsterapi
- Engangssprøjter
- Blandings- og udtagningsystemer
- Infusionskanyler og tilbehør
- Infusionsfiltre og filtersystemer
- Cyto systemer
- Enterale overføringssystemer
- Urologiske skyllesystemer
- Kundespecifikke systemer
- ARGUS green stream® pumper
- Contrelle® Activgard

I overensstemmelse med de etablerede kvalitetsstyrings systemer, inklusiv bestemmelserne i EN ISO 13485 og EU Direktiv 93/42/EØF samt certificeret af kompetente Notified Bodies.

Således er vi berettiget til at mærke vores produkter med:

CE 0123 TÜV Product service) for
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG • D-23738 Lensahn

CE 0088 (Lloyd's Register Quality Assurance) for
CODAN Steritex ApS • DK-3060 Espergærde

CE 0543 (Danish Medical Devices Certification) for
Codan Medical ApS • DK-4970 Rødby

CODAN gruppen

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG • BRD

CODAN Vertrieb GmbH & Co KG • BRD

CODAN 11 SA • Portugal

CODAN US Corporation • California • USA

CODAN Norge A/S • Norge

CODAN TRIPLUS AB • Sverige

CODAN Limited • Great Britain

CODAN France Sarl • France

CODAN Medical AG • Schweiz

ARGUS Medical AG • Schweiz

CODAN BV • Nederland

P.E.C Medical srl • Italia

CODAN Steritex ApS • Danmark

CODAN Medical ApS • Danmark

CODAN DEHA ApS • Danmark