

Varenummer 216082

Spike, Codan Deha, optrækskanyle til hætteglas, med SWAN lock (membran), steril



Produktbeskrivelse

Codan spike optrækskanyle med nålefri konnektor. Består af to kanaler - en til væske og en til luft.

Luftkanalen har to funktioner, som udligner overtryk påført ved tilførsel af væske i hætteglas og tage luft ind, når den færdige opløsning skal trækkes op.

Luftkanal har 0,2 µm aerosolfilter.

Brugervejledning

1. Hætteglas placeres på fladt underlag
2. Stik spike gennem hætteglassets membran
3. Af sprit SWAN og sæt sprøjte på
4. Sprøjten drejes en kvart omgang, hvilket fastgør sprøjten
5. Tilfør eller udtræk ønsket væskemængde
6. Væske tilføjes: Stil hætteglas på fast underlag og tilfør væsken i passende tempo, så udluftning kan finde sted
7. Væske udtrækkes: Vend hætteglasset med bunden i vejret og udtræk den ønskede mængde
8. Ved luft eller for meget væske, stilles hætteglas på fast underlag, sprøjten tømmes for luft og væske ned i hætteglasset.
9. Proceduren gentages fra punkt 6
10. Fjern sprøjten fra spiken i vandret position
11. Spiken skal forblive i hætteglasset når den kasseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spike
Varemærke	Codan Deha
Features	Optrækskanyle til hætteglas, med SWAN lock (membran), steril
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	18 cm	17 cm	12.5 cm	4055698031108
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.