

# Biatain® Ibu

- optimal absorption til smertefulde sår



Biatain Ibu ikke klæbende er en blød og formbar skumbandage med ibuprofen. Biatain Ibu Soft-Hold har desuden et let hæftende lag på skumpuden.

- Unik 3D skumstruktur med optimal absorption<sup>2</sup>
- Blød og formbar bandage<sup>3</sup>
- Kombinerer fugtig sårheling med lokal frigivelse af ibuprofen<sup>1</sup>
- Sårheling behøver ikke være smertefuld<sup>1,4,5</sup>



## Anvendelse

Biatain Ibu anvendes til en lang række af væskende sår, herunder bensår, tryksår, 2. grads forbrændinger, hudafskrabninger, donorsteder og ikke inficerede diabetiske fodsår. Biatain Ibu er velegnet til brug under kompression.



Biatain Ibu er en blød og formbar skumbandage.  
Biatain Ibu er den første og eneste bandage, der kombinerer  
fugtig sårheling med lokal frigivelse af ibuprofen.<sup>1</sup>



### Unik 3D skumstruktur til optimal absorption

Når sårvæsken er i kontakt med skumstrukturen, former Biatain Ibu sig tæt efter sårbunden for en optimal absorption - selv under kompression.

### Blød og formbar bandage

Biatain Ibu er en blød og formbar bandage, som er meget behagelig at have på. De affasede kanter i Biatain Ibu ikke klæbende reducerer risikoen for trykmærker.<sup>3</sup> Biatain Ibu Soft-Hold har desuden et let hæftende lag på skumpuden, hvilket gør bandageskift lettere på steder, som er vanskelige at bandagere.

### Kombinerer fugtig sårheling med frigivelse af ibuprofen

Ved kontakt med sårvæske frigives en lav dosis ibuprofen vedvarende til sårbunden gemmen hele bandagens bæretid (op til 7 dage).<sup>1</sup>

### Sårheling behøver ikke gøre ondt

Komparative studier viser, at Biatain Ibu nedsætter sårsmarter sammenlignet med bandager uden ibuprofen.<sup>4,5</sup>


### Virkning

Ibuprofen frigives til sårbunden, når Biatain Ibu er i kontakt med sårvæske.<sup>1</sup>

### Opbygning

Biatain Ibu indeholder 0,5 mg/cm<sup>2</sup> ibuprofen jævnt fordelt i hele skum-strukturen.<sup>1</sup>

### Unik 3D skumstruktur

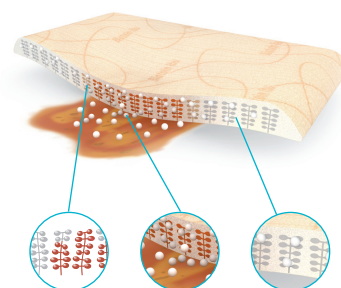

### Biatain Ibu

| Vare nr. | Størrelse i cm | Antal æske |
|----------|----------------|------------|
| 4105     | 5x7            | 5          |
| 4110     | 10x10          | 5          |
| 4112     | 10x20          | 5          |
| 4115     | 15x15          | 5          |
| 4120     | 20x20          | 5          |

### Biatain Ibu Soft Hold

| Vare nr. | Størrelse i cm | Antal æske |
|----------|----------------|------------|
| 4140     | 10x10          | 5          |
| 4142     | 10x20          | 5          |

1. Jørgensen et al. Wound repair and regeneration 2006;14(3): 233-39  
2. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf  
3. Vogensen. British Journal of Nursing 2006;15(21):1162-65.  
4. Gottrup et al. Wound Repair and Regeneration 2008;6:615-25  
5. Palao I Domenech et al. Journal of Wound Care 2008;17(8):342-48