

Skånsom sårbehandling




DuoDERM® Mini bandage er en sårbandage, der anvendes til okklusiv, fugtbevarende og effektiv sårbehandling af mindre sår med let sekretion. I kontakt med sårveske dannes en gel, som opretholder et fugtigt sårmiljø, hvilket fremmer den autolytiske debridering og sårheling. DuoDERM® Mini bandage består af en selvhæftende hydrokolloid masse, indeholdende gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose. Overfladen er belagt med en polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini bandage er forseglet med ekstra hæftkant, hvilket sikrer en god vedhæftning. DuoDERM® Mini bandage er vandtæt, og kan anvendes ved både brusebad og badning. Skiftes efter behov, dog mindst en gang om ugen. Varm gerne pladen mellem hænderne og sørg for, at huden er tør inden applicering på såret for at sikre den bedste vedhæftning.



DuoDERM® bandage er originalen blandt de hydrokolloide bandager.

DuoDERM® Mini bandage giver en okklusiv, fugtbevarende og effektiv sårbehandling til mindre sår med let sekretion. En okklusiv fugtbevarende sårheling giver følgende dokumenterede fordele:

- fremmer sårheling¹
- fremmer autolytisk debridering¹
- understøtter granulation og celledeling¹
- lavere infektionsrate sammenlignet med traditionel bandage²
- skader ikke og har ingen anden negativ indflydelse på nydannet væv³

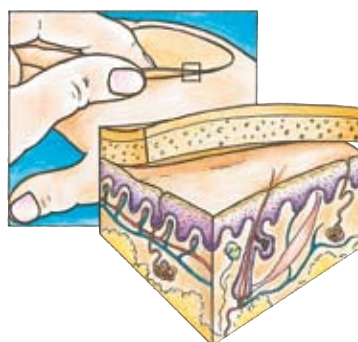

REFERENSER:

1. Jones VJ. The use of gauze: will it ever change? Int. Wounds J. 2006;3:79-86
2. Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. Am J Infect Control. 1990;18:257-268.
3. Friedman SJ, Su WPD. Management of leg ulcers with hydrocolloid occlusive dressing. Arch Dermatol. 1984;120:1329-1336.
4. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds. 1993;5:1-8.

DuoDERM® Mini bandage

Størrelse
5 x 5 cm

Stk./ æske
50 stk.

Varenr.
37300



FAKTA

DuoDERM® Mini bandage

DuoDERM® Mini bandage er en steril, selvhæftende 2 lags bandage, indeholdende gelatine, pektin og natriumcarboxymethylcellulose (CMC). Overfladen er belagt med en polyurethanfilm/-skum. DuoDERM® Mini bandage er forseglet med ekstra hæftekant, hvilket sikrer en god vedhæftning.

INDIKATIONER

Anvend DuoDERM® Mini bandage til mindre sår med let sekretion. Bandagen kan med fordel anvendes til skrabsår, gnavsår eller brandskader på svært bandagerbare områder, såsom hænder, fødder, ryg og hofter, samt ved små kirurgiske indgreb som laparoskopisk kirurgi eller biopsier.

SKIFTEFREKVEN

Bandagen skiftes efter max. 7 dage, eller når den er mættet.

OPBEVARING & HOLDBARHED

Opbevares ved stuetemperatur. Holdbarheden er 5 år.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFICERING

DuoDERM® Mini bandage er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i æsken.

 **ConvaTec**
A Bristol-Myers Squibb Company

ConvaTec
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.nr.: 45 87 60 11. Fax: 45 87 35 11
Kundeservice: 80 30 60 11
Mail: convatec.danmark@bms.com
www.convatec.dk