


SÅRBEHANDLING

DuoDERM E Border sårbandage.




DuoDERM E Border er smidig, og egner sig specielt til sår med mindre til moderat sekretion. Kan anvendes til behandling af alle sårtyper. Patienten vil ofte føle smertelindring i såret ved denne bandagering. Den ekstra brede klæbekant giver god fiksering.

Det øverste lag består af polyurethan-skum.

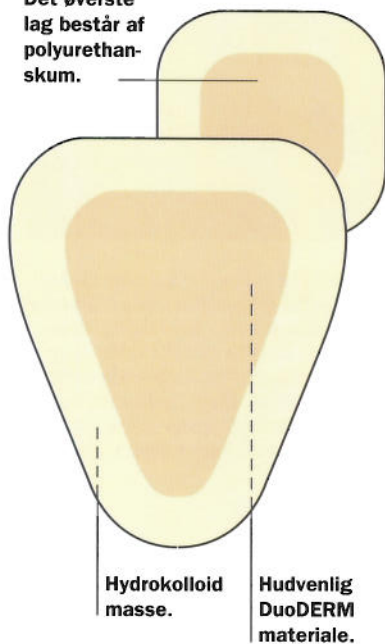

DuoDERM-massen, giver et ideelt helingsmiljø og beskytter huden omkring såret.

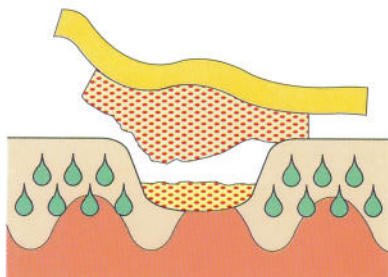

DuoDERM E Border sårbandage.

DuoDERM E Border egner sig til bandagering af alle sårtyper, med lille til moderat sekretion. Gennem det fugtige biologiske helingsmiljø opnåes optimale forhold for en hurtig sårheling. DuoDERM E Border har en diskret farve, og pladen sidder på ved bruse og karbad. På grund af den ekstra klæbekant anvendes pladen på sværtbandagerende områder, som f. eks. tryksår på os sacrum, trochanter og hæle.

Fakta om DuoDERM E Border sårbandage.

DuoDERM E Border er en steril selvklæbende to-lagsplade med ekstra hæftekant, bestående af pektin, gelatine og natriumcarboxymethylcellulose (CMC) og syntetisk elastomer. Pladen leveres i flere størrelser. Pladen bør ikke tilklippes da den herved mister den ekstra hæftekant. Pladen bør hæfte ca. 3 cm. udenfor sårkanten. DuoDERM E Border skiftes efter behov, eller én gang per uge.

Opbevaring og holdbarhed.

Opbevares tørt ved stuetemperatur. Gammasteriliseret. Holdbarhed: 5 år.

VARENUMMER


DuoDERM E Border sårbandage.

Størrelse	Stk / pakn.	Varenummer
10 x 10 cm.	5 stk.	H 7970
14 x 14 cm.	5 stk.	H 7971
15 x 18 cm.		
(dråbe)	5 stk.	H 7973
20 x 23 cm.		
(dråbe)	5 stk.	H 7974


Således anvender du DuoDERM E Border sårbandage.




Tidligere anlagt DuoDERM-plade løsnes først rundt i kanterne, hvorefter den forsigtigt rulles af huden. Såret skylles skånsomt og løse fragmenter fjernes. Om muligt anvendes sprøjte. Aftør huden rundt om såret grundigt.

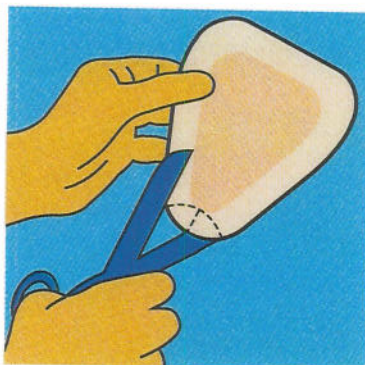


Vælg en dråbeformet eller kvadratisk DuoDERM E Border. Dråbeformet plade anvendes på sakrale sår. Spidsen kan vende opad eller nedad. Alternativt kan spidsen klippes bort, afhængig af sårets placering.

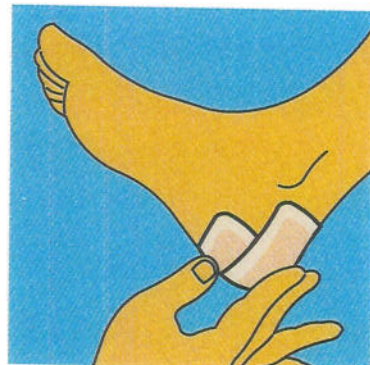


Kvadratisk plade kan anvendes på hæle og albuer, ved at klippe slidser ind fra siderne.

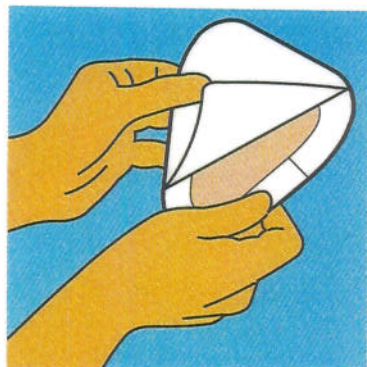

Beskyttelsesfilmen fjernes over DuoDERM materialet. Undgå at røre undersiden af bandagen med fingrene.

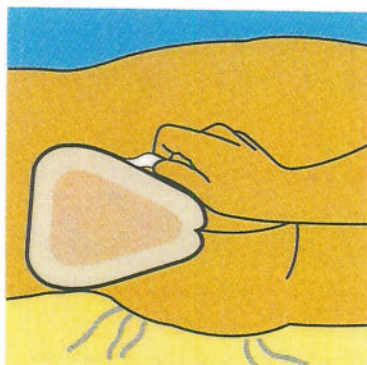

Påsæt bandagen med en rullende bevægelse. Påtryk bandagen godt på midten. Beskyttelsesfilmen fra kanten af bandagen fjernes og pladen varmes godt fast med håndvarme.

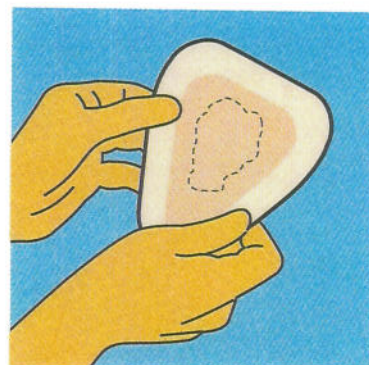

DuoDERM E Border kan anvendes ved samtidig trykflastning. Afhængig af sekretionen fra såret sidder DuoDERM E Border oftest i flere dage. Skift bandagen ved behov eller før lækage opstår. Risikopatienter som er f. eks. malnutrierede eller immunosupprimerede kontrolleres ofte.