



SÅRBEHANDLING
INTENSIVPLEJE
STOMIPLEJE
UROLOGI
OPERATION
FIXATION



Skånsom sårheling



DuoDERM® Extra Thin er en okklusiv, absorberende bandage, som kan anvendes til tørre og let væskende sår. Ved kontakt med sårveske dannes en fugtig gel, som opretholder det fugtige sårmiljø, der fremmer sårhelingen¹.

DuoDERM® Extra Thin-bandage er en hæftende plade, som er virus- og bakterietæt^{2,3}, fleksibel, og som kan klippes til den ønskede pasform. Bandagen bør gå ca. 3 cm ud over den raske hud. Kan anvendes som både primær og sekundær bandage. Bandagen findes også i post-op størrelser.



ConvaTec



Hygiejne

– bakterie- og virustæt barriere^{2,3}

Sårheling

– skaber optimalt miljø for sårheling¹


Veldokumenteret

– DuoDERM®-familien er en af verdens mest veldokumenterede bandager

Tips ved anvendelse:

- Varm bandagen med hænderne, inden den appliceres på såret
- Applicer DuoDERM® med en margin på 3 cm ud over sårkanterne
- Vær opmærksom på, at huden er tør, inden pladen appliceres
- Ved moderat til kraftigt væskende sår, kan DuoDERM® kombineres med AQUACEL® Hydrofiber®-bandage
- Bandagen kan sidde på i op til 7 dage, eller skiftes når det er klinisk indikeret.

Klippeguide for DuoDERM®

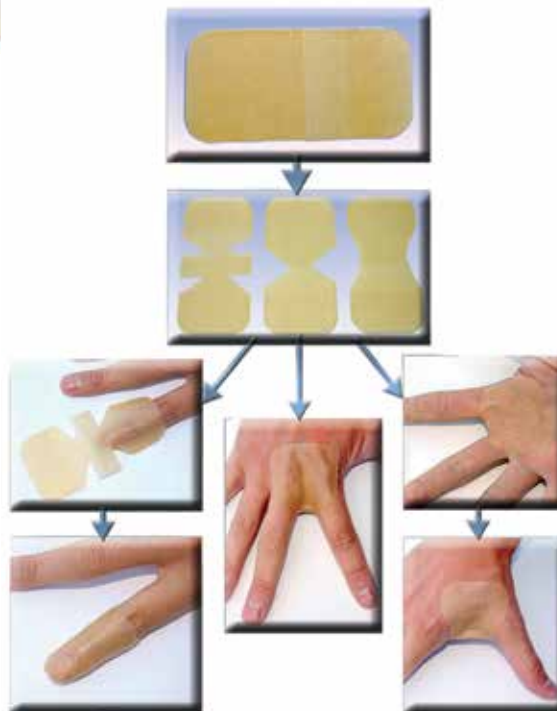

DuoDERM® Extra Thin-bandage

Størrelse	Stk/æske	Varenr.
10 x 10 cm	20	401807
10 x 15 cm (oval)	5	651008
7,5 x 7,5 cm	5	187951
10 x 10 cm	5	187954
15 x 15 cm	5	187956
5 x 10 cm	10	187959
5 x 20 cm	10	187961
9 x 15 cm	10	187920
9 x 25 cm	10	187921
9 x 35 cm	10	187922



FAKTA

DuoDERM® Extra Thin er en tynd hæftende bandage, der består af en underside af hydrokolloider i en vedhæftende masse og en overside af polyurethanfilm. Den vedhæftende overflade indeholder syntetiske elastomerer, der øger bandagens evne til at håndtere sårveske.

INDIKATIONER

DuoDERM® Extra Thin anvendes til tørre og let væskende sår, f.eks. tryksår (kategori I-II), bensår, diabetiske sår, kirurgiske sår, delhudsforbrændinger, donorsteder, skrabsår og gnavsår.

SKIFTEFREKVENNS

Bandagen skiftes efter max. 7 dage, eller når den er mættet.

OPBEVARING

Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærkt lys.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFICERING

DuoDERM® Extra Thin er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

5 år.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i æsken.



Latexfri

PVC fri



ConvaTec

ConvaTec Denmark A/S

Skinderskovvej 32-36 · 2730 Herlev

Kundeservice: 48 16 74 74

E-mail: convatec.denmark@convatec.com

www.convatec.dk