



"Der er så mange typer sår"

"På afdelingen modtager vi patienter med alle typer væskende sår. Vi har mange bandager at vælge mellem, men for os er det vigtigst, at en bandage er fleksibel og kan absorbere sårvæske i varierende mængder. Hvert sår udvikler sig jo individuelt."

Sygeplejerske, ortopædkirurgisk afdeling

Det enkle valg til væskende sår

AQUACEL®-bandage er en all-round bandage, som giver optimal sårheling¹ ved moderat til kraftigt væskende kroniske og akutte sår. AQUACEL®-bandagen absorberer sårvæske hurtigt og omdannes til en sammenhængende gel, som binder sårvæsken selv under kompression.¹ Bandagen er nem at lægge på og fjerne igen² og kan sidde på i op til syv dage.

Få bandageskift¹ af såret er en klar fordel for både behandler, patient og sårets helingsproces.

Indikationer: Tryksår, bensår, diabetiske fodsår, brandsår og kirurgiske sår.

Førstevalg til heling af væskende sår

- **All-round, fleksibel bandage til fugtig sårheling**
- **Optimalt sårhelingsmiljø - hurtig geldannelse¹, absorption af væske, bakterier og enzymer¹, dæmpet inflammation³**
- **Binder væske og bakterier - også under kompression¹**
- **Bevarer sårkanterne intakt, forhindrer maceration¹**
- **100 % geldannende fibre**
- **15 års klinisk erfaring**

**EVIDENS
BASERET**

AQUACEL®
Dressings



AQUACEL®-bandager

Størrelse	Antal pr. æske	Varenummer
5 x 5 cm	10 stk.	177901
10 x 10 cm	10 stk.	177902
10 x 10 cm	5 stk.	177918
15 x 15 cm	5 stk.	177903
4 x 10 cm	10 stk.	403730
4 x 20 cm	10 stk.	403731
4 x 30 cm	10 stk.	403732

Indhold: AQUACEL®-bandager består af unik Hydrofiber®-teknologi (100 % natriumcarboxymethylcellulose).

Indikationer:* AQUACEL®-bandager kan anvendes som primær bandage ved moderat til kraftigt væskende sår.

- Kroniske (langsomt helende) sår: Bensår, tryksår, diabetiske fodsår.
- Akutte sår: Delhudstransplantater, hudafskrabninger, lacerationer, postoperative sår og delhudsbrandskader.

Skifteinterval: Skift bandage, når det er klinisk indiceret. Bandagen kan sidde på i op til 7 dage.

Opbevaring: Ved stuetemperatur.

Steriliseringsmetode: Gammasteriliseret.

Klassificering: AQUACEL®-bandager er CE-mærkede og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed: 5 år i uåbnet emballage.

LATEXFRIT produkt og indpakning.

*Se brugsanvisning i emballagen for mere information.

Referencer:

1. Walker M. et al. Hydrofiber® Technology: its role in exudate management. *Wounds UK*, 2010, Vol 6, No 2.
2. Harding K. G. et al. Cost and Dressing Evaluation of Hydrofiber and Alginate Dressings in the Management of Community-Based Patients with Chronic Leg Ulceration. *Wounds* 2001; 13(6): 229-236.
3. Hoekstra M. J. et al. A histological comparison of acute inflammatory responses with a hydrofibre or tulle gauze dressing. *Journal of Wound Care*, 2002, Vol 11, no 3.