


CarboFlex®


Bandagen, der fjerner lugt

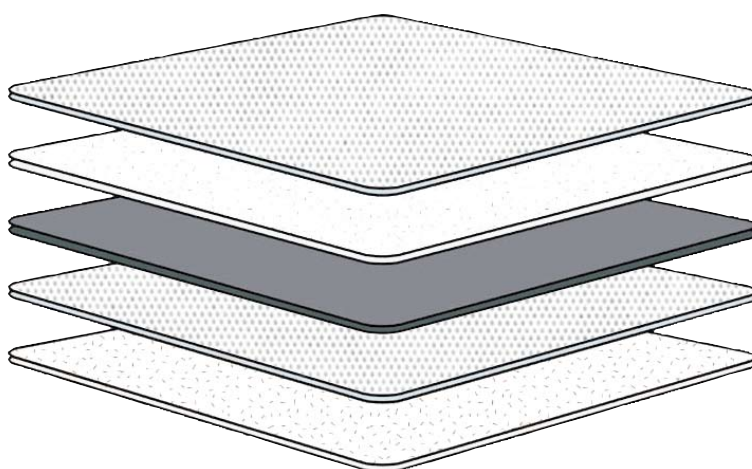

CarboFlex®-bandage er en lugt- og væskeabsorberende bandage, som kan anvendes til væskende og ildelugtende sår. Absorptionsfladen absorberer væske og skaber et fugtigt sårmiljø. Kulfilteret i CarboFlex-bandagen absorberer lugten, hvilket giver en lugtreduktion. Resultatet kan blive færre bandageskift, en omkostningseffektiv behandling og færre gener for patienten.

Our world is what we make of it™

CarboFlex®

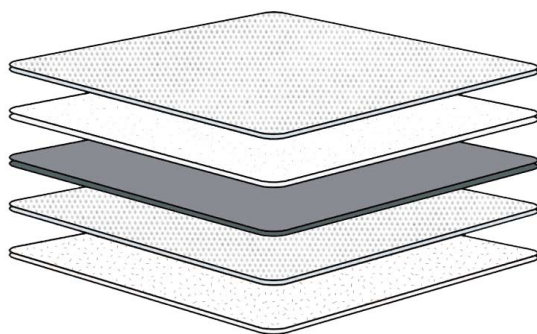

CarboFlex-bandage opretholder et fugtigt sår miljø og er nem at fjerne fra såret.

Kulfilteret, som består af aktivt kul, absorberer lugt fra såret.

Gunstigt sårhelingsmiljø – absorptionsfladen (Hydrofiber® og alginat) danner en gel, som skaber et fugtigt sår miljø.

ABSORBERER LUGT OG SÅRVÆSKE

CarboFlex-bandage har en god og hurtig absorptionsevne og binder sårvæsken. Risikoen for maceration reduceres, og antallet af bandageskift minimeres. CarboFlex-bandage er egnet til væskende og ildelugtende sår.

BEHAGELIG FOR PATIENTEN

CarboFlex-bandage danner en gel ved kontakt med sårvæske og er derfor nem at fjerne uden ubehag for patienten.

NEM AT ANVENDE

CarboFlex-bandage lægges direkte i såret og appliceres med en margin på 3 cm ud over sårkanterne. CarboFlex-bandage kan anvendes som primær og sekundær bandage. Ved dybe sår kan sårkaviteten fyldes med AQUACEL® Hydrofiber®-bandage. CarboFlex-bandage kan anvendes til inficerede sår, som behandles af medicinsk personale. Ved inficerede sår anbefales AQUACEL® Ag-bandage med 1,2 % ioniseret sølv som primær bandage.

FAKTA

CarboFlex®-bandage er en steril ikke klæbende bandage med et absorberende sårkontaktag (bestående af alginat og Hydrofiber®), et mellemag af aktivt kul og et fleksibelt vandafvisende lag. Bandagen må ikke klippes eller skæres i stykker. Vend den grå flade ned mod såret.

INDIKATIONER

CarboFlex-bandage kan anvendes ved behandling af akutte og kroniske sår med dårlig lugt, f.eks. bensår, tryksår, cancersår og diabetessår, akutte sår som f.eks. postoperative sår, donorsteder og delhudsforbrændinger. CarboFlex-bandage kan anvendes til inficerede sår. Ved behandling af inficerede sår anbefales AQUACEL® Ag-bandage med 1,2 % ioniseret sølv som primær bandage.

SKIFTEINTERVAL

Bandagen skiftes efter max. tre dage, eller når den er mættet. Hvis såret er inficeret, bør CarboFlex-bandagen skiftes oftere.

OPBEVARING

Produktet opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærkt lys, kulde og høj luftfugtighed.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFICERING

CarboFlex-bandage er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

5 år.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i pakken.

CarboFlex®

Størrelse	Stk./æske	Varenummer
10 x 10 cm	10	403202
8 x 15 cm (oval)	5	403203
15 x 20 cm	5	403204



ConvaTec

Realize the possibilities™

ConvaTec Denmark Aps,
Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød,
kundeservice: 45 87 60 11,
www.convatec.dk,
convatec.danmark@convatec.com