




Absorberende bandage med lækagebarriere.

Mesorb er en blød højtabsorberende bandage, der kan indeholde store mængder sårsekret. Den væskeafvisende lækagebarriere hjælper med at forebygge at sekretet siver ud på tøj og sengetøj

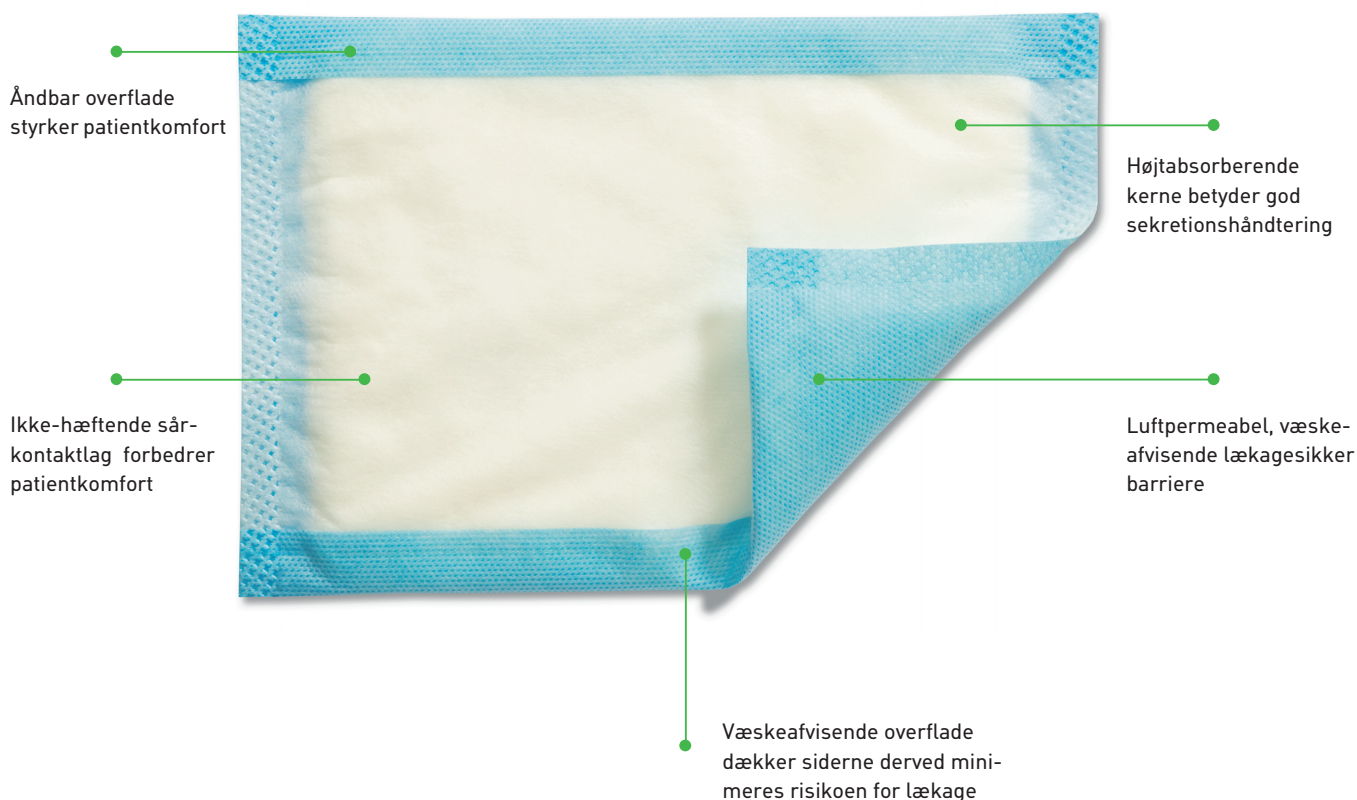


Sådan fungerer Mesorb

Sårsekret ledes ind i Mesorb gennem det ikke hæftende kontaktag. Den højtabsorberende kerne absorberer sekretet, giver en optimal ventilering af såret og skaber en beskyttende effekt. Den væskeafvisende bagside hindrer lækage opadtil samt ud til siderne.


Anvendelsesområder

Mesorb er udviklet til at kunne håndtere sekret fra moderat til meget væskende sår. Mesorb kan anvendes som primærbandage direkte på såret eller som sekundærbandage, hvor der er behov for en højtabsorberende bandage. Eksempelvis sammen med Mepitel® eller Mepilex® Transfer


Sådan anvendes Mesorb

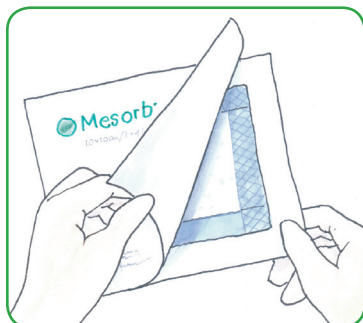

Pakken åbnes og bandagen tages ud

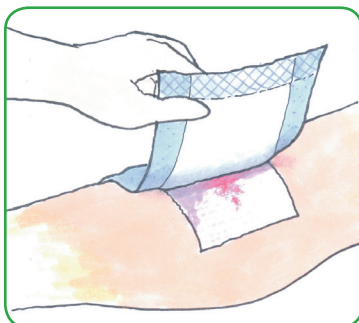

Appliker Mesorb på sårområdet eller på den valgte primærbandage med mindst 1 cm overlap på den omkringliggende hud.

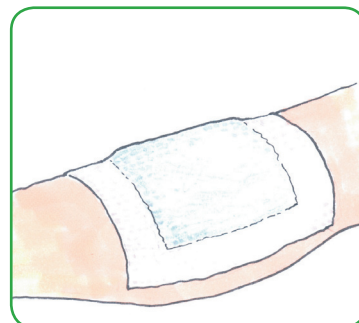

Fikses med eksempelvis Mefix®, Mepore® Film eller Tubifast™

Skiftefrekvens

Mesorb kan sidde på i adskillige dage afhængig af såret og hudens tilstand, eller ifølge klinisk praksis.

Fordele ved Mesorb

- Højtabsorberende
- Tilbageholder stor væskemængde i absorptionskernen
- Åndbar
- Omkostningseffektiv
- Den unikke væskeafvisende lækagebarriere reducerer skiftefrekvensen og forebygger gennemsivning

Forholdsregler

Mesorb bør ikke appliceres på inficerede sår uden at konsultere ansvarlig personale.



Mesorb er pakket i sterile engangspakninger

Art.nr	Str. cm	Stk./inderkrt	Stk./trp.krt
677001	10 x 13	50	400
677201	13 x 15	50	300
677401	10 x 23	50	300
677601	15 x 23	50	300
677701	23 x 25	30	120
677801	23 x 30	30	120