




Rensende natriumkloridbandage

Mesalt stimulerer effektivt rensningen af meget væskende og sivende inficerede sår.

Absorberende nonwoven
materiale, der er
imprægneret med
natriumklorid

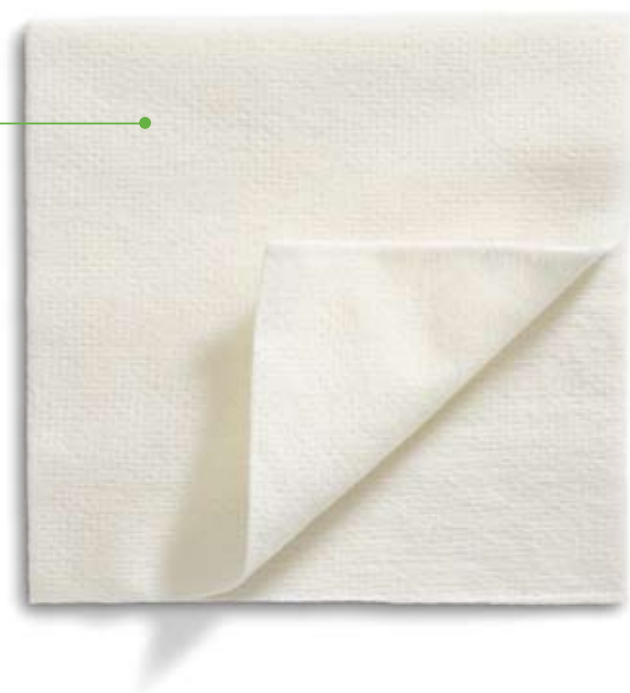

Sådan virker Mesalt


Sekretionen fra såret udløser natriumkloriden fra bandagen. Mesalt stimulerer effektivt rensning af sår i den inflammatoriske fase ved at absorbere ekssudat, bakterier og nekrotisk materiale fra såret, hvorved den naturlige sårhelingsproces fremmes.

Anvendelsesområder


Mesalt er beregnet til håndtering af kraftigt væskende og inficerede sår i den inflammatoriske fase som:

- Tryksår
- Kirurgiske sår


Sådan anvendes Mesalt

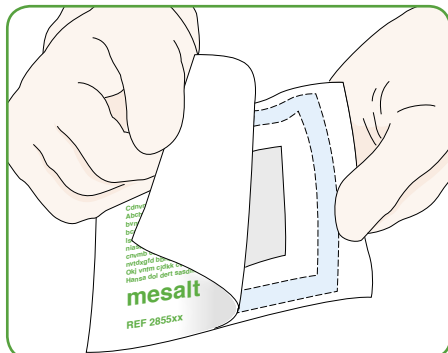

Såret renses og emballagen åbnes.

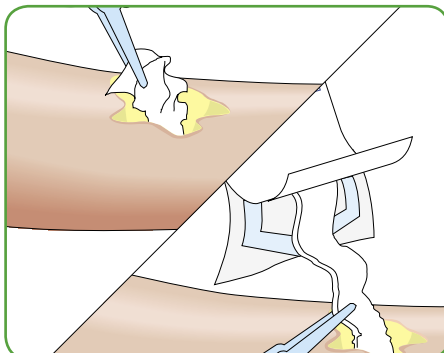

Applicer eller læg tør Mesalt løst ned i såret.

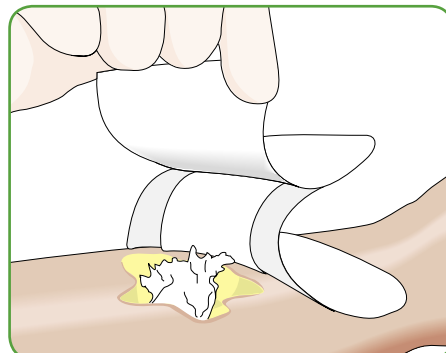

Mepilex Border påsættes som sekundær bandage. Afhængig af mængden af ekssudat bør Mesalt skiftes daglig eller hyppigere hvis nødvendigt.

Fordele ved Mesalt

- Stimulerer debridering
- Reducerer bakteriemængde
- Let at anvende

Forbehold

Mesalt bør ikke anvendes til tørre sår.



Mesalt er pakket sterilt og i enkelte pakninger

Art.nr.	Str. (cm)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
285580	5 × 5	30	240
285780	7,5 × 7,5	30	240
286080	10 × 10	30	180
285280	2 × 100	10	80

Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf. 48 168 168
www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care navn og logo, og Mesalt® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

