



Hypergel® - Debrideringshydrogel med 20% natriumklorid

Den høje koncentration af natriumklorid tilfører fugt og muliggør naturlig debridering af nekrotisk væv.





Sådan virker Hypergel

Påfør Hypergel på tørt nekrotisk væv, men ikke på den omkringliggende hud. Den høje koncentration af natriumkloridgel tilføjer fugt og muliggør naturlig debridering af nekrotisk væv. Sårhelingsmiljøet forbedres, når nekrotisk væv fjernes.

Anvendelsesområder

Hypergel er beregnet til at blødgøre og fjerne tør nekrose.


Sådan anvendes Hypergel



Hætten skrues af og låseringen fjernes. Skru hætten på igen og drej den frem og tilbage, så forsejlingen brydes.



Skru hætten af og tuben er klar til brug. Påfør et tyndt lag i det nekrotiske sår

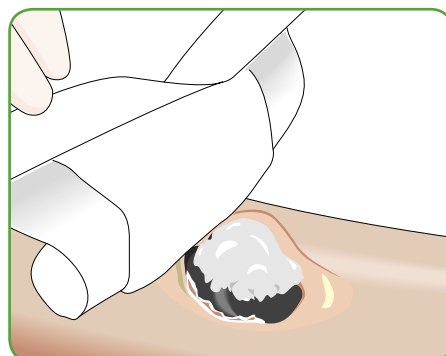

Applicer en sekundærbandage fx Mepilex Border.

Fordele ved Hypergel

- Blødgør og opløser tørre nekroser
- Naturlig substans
- Let at anvende

Bemærk

Inden behandling med Hypergel skal de cirkulatoriske forudsætninger for sårheling bedømmes.



Hypergel er steril og leveres i tuber

Art.nr.	Indhold (g)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
360500	5 g	10	40
361500	15 g	10	40

Mölnlycke Health Care ApS
 Gydevang 33, 3450 Allerød
 Tlf. 48 168 168
www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care navn og logo og Hypergel® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

