



Blødt transparent silikone sårkontaktlag


- Atraumatisk mod såret og den omkringliggende hud ved bandageskift.
- Lav skiftefrekvens – kan sidde på såret i adskillige dage, hvilket sikrer en uforstyrret og omkostningseffektiv sårheling.

Polyamid net

- Den åbne struktur gør det muligt at anvende salver o.lign.
- Transparent

Safetac® lag (blød silikone)

- Atraumatisk mod såret og den omkringliggende hud ved skift
- Minimerer risikoen for maceration

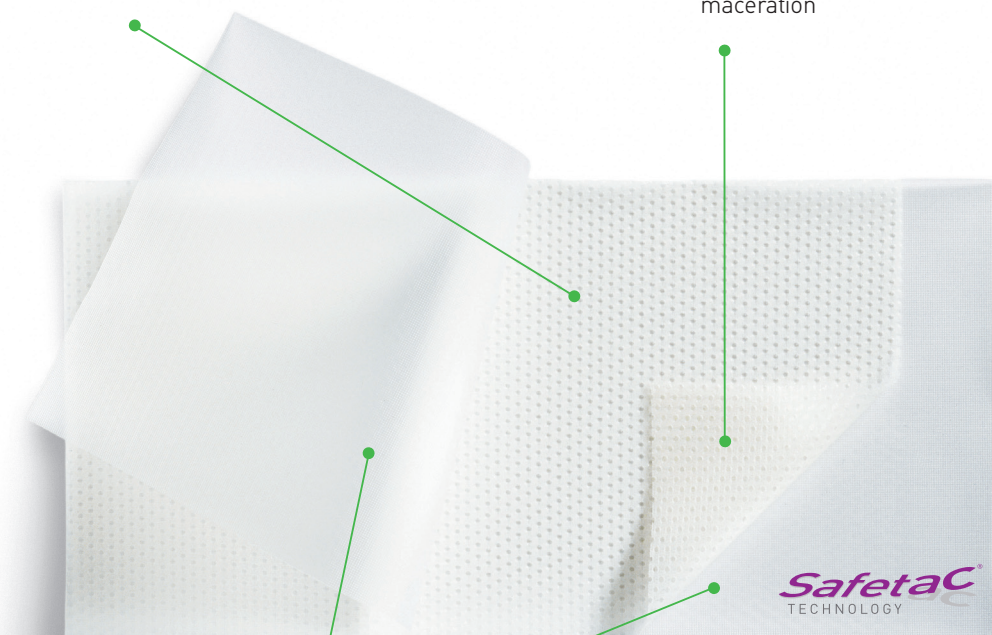

Beskyttelsesfilm


- Beskytter Safetac laget

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre traume. Mindre smerte.™

Safetac® er en patenteret blød silikone klæbeteknologi. Bandager med Safetac teknologi er atraumatiske ved aftagning. Bandagerne minimerer traume mod såret og den omkringliggende hud, og mindsker derved smerte hos patienten. Risikoen for maseration minimeres ved at bandagen forsejler sårkanterne.

Læs mere på: www.safetac.com

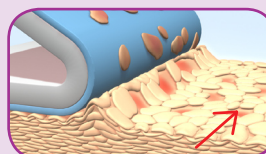

Stripping af hudceller med traditionel klæb

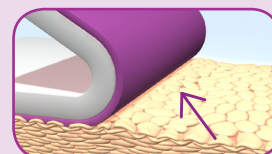


Ingen stripping af hudceller med Safetac


Sådan virker Mepitel

Mepitel kan sidde på såret i adskillige dage afhængig af sårets tilstand. Den åbne struktur tillader ekssudat at passere til en absorberende yderforbinding, som kan skiftes efter behov. Mepitel forhindrer at yderforbindingen hænger i såret og minimerer dermed traume og smerte ved bandageskift. Resultatet er mindre ubehag for patienten samt en uforstyrret sårheling.


Sådan anvendes Mepitel

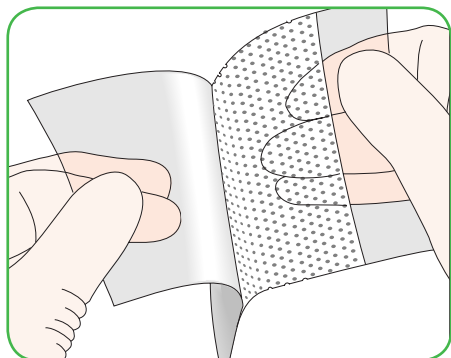

Rens såret. Fjern beskyttelsesfilmen.

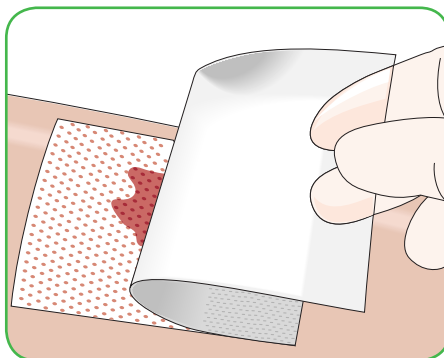

Applicer Mepitel.

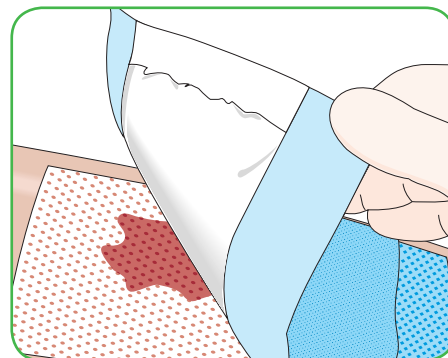

Læg den absorberende yderforbinding (fx. Mesorb) på.

Fordele ved Mepitel

- Hæfter ikke til det fugtige sårleje men kun blidt til den omkringliggende hud
- Minimerer traume og smerte ved bandageskift
- Kan sidde på såret i adskillige dage og sikrer dermed en uforstyrret heling
- Lav skiftetrekvens
- Minimerer risikoen for maceration
- Beskytter nydannet skrøbelig væv mod skade
- Transparent, hvilket gør det lettere at inspicere såret
- Tilpasser sig kroppens konturer og giver god patientkomfort

Bemærk

Er Mepitel anvendt på brandsår behandlet med transplantat eller efter ansigtsrekonstruktion, kan det efterlade mærker, hvis ikke Mepitel anvendes korrekt.

Anvendelsesområder

Mepitel er velegnet til en bred vifte af sårtyper som f.eks. skin tears, hudafskrabninger, snitsår, 2. grads forbrændinger, blærer, rifter, del- og helhudstransplantater, diabetiske sår, venøse- og arterielle sår.

Forholdsregler

- Såret skal inspiceres for tegn på infektion i henhold til gældende praksis. Ved tegn på infektion kontaktes en læge.
- Mepitel anvendt på brandsår behandlet med transplantat: Undgå unødigt pres på forbindingen.
- Mepitel anvendt efter ansigtsrekonstruktion: undgå unødigt pres på forbindingen, løft og genplacer forbindingen mindst hveranden dag.
- Mepitel anvendt på blødende sår eller sår med høj viskositet bør dækkes med en fugtig absorberende pude.
- Når Mepitel anvendes til fiksering af hudtransplantater og blærer skal bandagen ikke skiftes før på femte dagen.

Hvad er Safetac teknologi?

Safetac® er en patenteret blød silikone hæfteteknologi som giver en blid tilhæftning til huden. Bandager med Safetac teknologi er atraumatiske både under brug og ved bandageskift.



Sortiment

Art.nr.	Str. cm	Stk. inderkrt.	Stk./trp.krt.
290510	5 × 7,5	10	50
290710	7,5 × 10	10	40
291010	10 × 18	10	70
292005	20 × 30	5	30
Apotekssortiment			
290560	5 × 7,5	2/16	160

Steril pakket.

Mölnlycke Health Care ApS
 Gydevang 33
 3450 Allerød
 Tlf.: 48 168 168
www.molnlycke.com

Mölnlycke symbolet og billedteksten er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care