



Varenummer 220262

## Sårkontaktlag, Mepitel One, 7,5x5cm, med silikoneklæber, steril

- ✓ Minimerer traume og smerte ved bandagskift
- ✓ Klæber kun på den ene side for lettere applicering
- ✓ Kan blive på såret i op til 14 dage
- ✓ Omkostningseffektiv og uforstyrret sårheling



### Produktbeskrivelse

Mepitel One er et sårkontaktlag af polyester belagt med silikoneklæber på den ene side. Silikoneklæberen hæfter blidt på tør hud og kan fjernes uden at strippe huden. Reducerer således smerter og traume ved forbindskift. Silikone forsejler sårkanterne og reducerer derved risikoen for maceration. Kan ligge på såret i op til 14 dage. Kan klippes i. Fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

### Specifikationer

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                  | Sårkontaktlag  |
| Varemærke                          | Mepitel  |
| Vareserie                          | One  |
| Features                           | Med silikoneklæber, steril   |
| Engangs/flergangs                  | Engangs  |
| Ingredienser/sammensætning         | PAnet, med silikone  |
| Længde/dybde                       | 7.5 cm   |
| Bredde                             | 5 cm   |
| Steriliseringsmetode               | ETO  |
| Certifikater                       | CE. MD.  |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)       | Klasse IIb   |
| Direktiver, lovgivning og regler   | MDR (EU) 2017/745  |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Når Mepitel One anvendes på brandsår eller i forbindelse med ansigtsrekonstruktion kan det efterlade mærker, hvis produktet ikke anvendes korrekt.<br>Såret skal inspiceres for tegn på infektion i henhold til gældende praksis. Ved tegn på infektion kontaktes læge.<br>Hvis Mepitel One anvendes på Epidermolysis Bullosa patienter, skal bandageskiftene være mere forsigtige, idet klæbeevnen for Mepitel One er kraftigere end for Mepitel.<br>Mepitel One anvendt på brandsår behandlet med transplantat: Undgå unødigt pres på bandagen.<br>Mepitel One anvendt i forbindelse med ansigtsrekonstruktion: Undgå unødigt pres på bandagen, løft og genplacer bandagen på ny mindst hveranden dag.<br>Når Mepitel One anvendes til fiksering af hudtransplantater og blærer, bør bandagen ikke skiftes før på femte dagen. |
| Holdbarhed                         | 3 år fra produktionsdato   |
| Opbevaringsinstruktioner           | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.   |
| Bortskaffelse af produkt           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.   |
| Bortskaffelse af emballage         | Kan genanvendes eller forbrændes.  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|--------|---------|---------------|
| kll   | 70 stk     | 19.2 cm | 13 cm  | 15.5 cm | 7323190232154 |
| pk    | 10 stk     | 14.4 cm | 12 cm  | 2.5 cm  | 7323190232161 |
| stk   | 1 stk      |         |        |         | 7332430989727 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt