

● Mepore® Film

Åndbar, transparent selvklæbende filmbandage

Mepore Film er en transparent selvklæbende filmbandage, der er ideel som sekundær fikseringsbandage og som primærbandage til en lang række rene sår. Appliceringssystemet til Mepore Film er enkelt og brugervenligt.

Støttende beskyttelsesfolie og papirramme, der gør appliceringen lettere

Transparent, åndbar, elastisk polyurethanfilm, der giver patientkomfort og et optimalt sårhelingsmiljø

Virus- og bakterietæt film, der er uigennemtrængelig for væske, giver sikkerhed og beskyttelse

Hudvenlig polyakrylat klæb som giver en blid og sikker fiksering

Sådan virker Mepore Film

Mepore Film former sig efter kroppens konturer, beskytter såret og fungerer som en barriere mod lækage og bakteriel kontaminering.

Mepore Film opretholder et fugtigt sårmiljø samtidig med at den høje permeabilitet sikrer at overskydende fugt fordamper fra såret og den omkringliggende hud.


Anvendelsesområder

Mepore Film kan anvendes som en fleksibel fikseringsløsning af primærbandagen som fx. en hydrogel-, alginat- og skumbandage.


Mepore Film er desuden beregnet til en række forskellige rene sår i granulationsfasen, f.eks.:

- Overfladiske brandsår
- IV-steder
- Hudafskrabninger
- Snitsår
- Donorsteder
- Overfladiske tryksår
- Lukkede kirurgiske sår
- Forebyggelse af hudlæsioner


Sådan anvendes Mepore Film

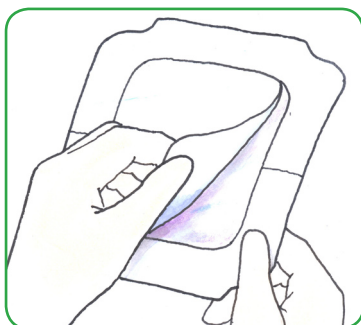

For størrelserne 10 × 25 cm og 15 × 20 cm: Fjern det udskårne papir i midten.

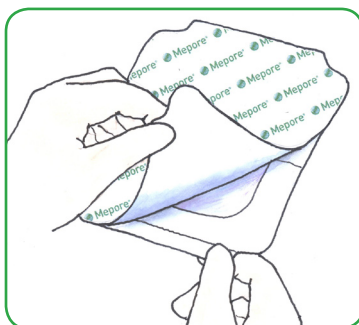

Fjern beskyttelsesfolien (påtrykt Mepore) så klæben ses.

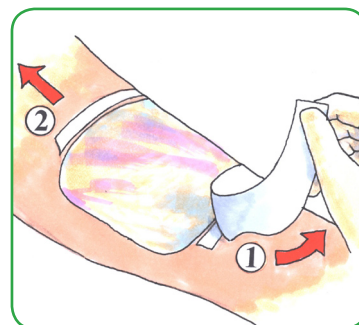

Anbring bandagen og glat den ud på huden. Fjern papirrammen. Fjern de to hvide papirsdeflapper. Stræk ikke bandagen, når du applicerer den!

Fordele ved Mepore Film

- Høj åndbarhed
- Nem applicering, også med handsker på
- Begrænser risikoen for skader på nydannet væv
- Tilpasser sig nemt efter kropskonturerne
- Hudvenlig klæb
- Sikker fiksering
- Opretholder et fugtigt sårmiljø
- Virus- og bakterietæt og danner en barriere mod lækage
- Ikke permeabel for væske

Bemærk

Mepore Film bør ikke anvendes på dybe sår, der involverer muskler, sener, knogler eller tredjegradsforbrændinger.

Mepore Film bør ikke appliceres på patienter, der er overfølsomme overfor klæbemidler af akryl.



Mepore Film er indpakket sterilt i enkeltpakker

Varenr.	Størrelse cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt
270600	6 × 7	100	600
270670	6 × 7	10	50
271500	10 × 12	50	210
271570	10 × 12	10	70
272500	10 × 25	20	100
272570	10 × 25	10	50
273000	15 × 20	10	50
273500	20 × 30	5	30

Mölnlycke Health Care ApS
 Gydevang 33, 3450 Allerød
 Tlf. 48 168 168 - info.dk@molnlycke.com
 www.molnlycke.com

Symbolet og ordmærket er begge registrerede varemærker eller patentanmeldte varemærker tilhørende Mölnlycke Health Care.