


Hypafix*

**Porøs fikseringstape med
hypo-allergen klæbemasse**

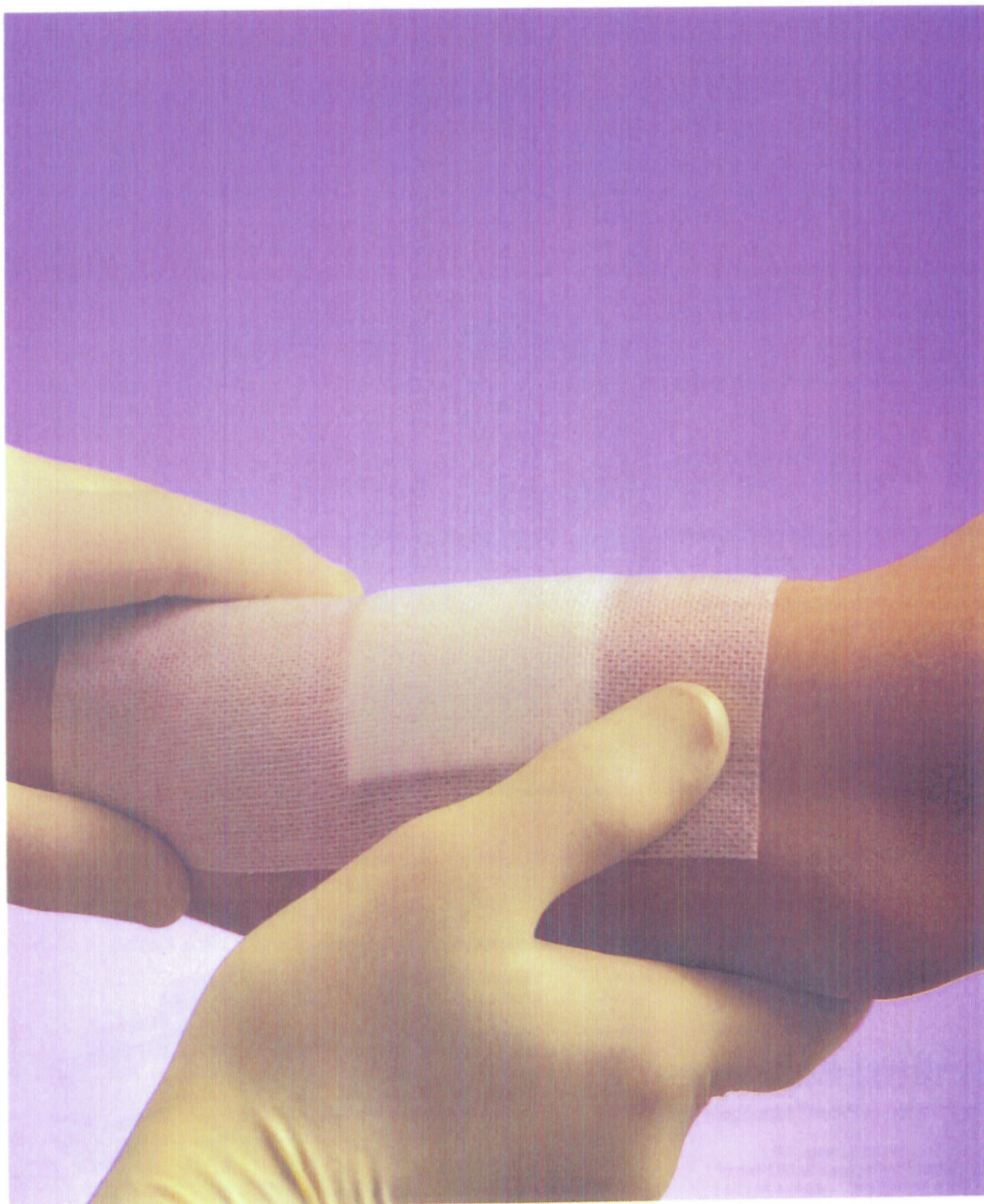

Hypafix

Porøs fikseringstape med hypo-allergen klæbemasse

- Sikker fiksering af forbindinger m.m.
- Fleksibel og smidig
- Tillader huden at ånde
- Behagelig for patienten
- Let at håndtere
- Økonomisk i brug

HYPAFIX er en selvklæbende, non-woven fikseringstape. Produktets smidighed gør applikation over led lettere, og elasticiteten øger patientens bevægelsesfrihed. Den hud- og miljøvenlige klæbemasse er fremstillet uden brug af organiske opløsningsmidler.

FORDELE

Sikker fiksering af forbindinger m.m.
Den hudvenlige klæbemasse har en stor klæbeevne, der sikrer fiksering af diverse forbindinger.

Fleksibel og smidig

Tapens elasticitet og smidighed letter applikationen selv på vanskelige steder, såsom over knæ.

Tillader huden at ånde

Det porøse non-woven materiale forhindrer maceration af huden.

Behagelig for patienten

På grund af materialets smidighed sikres patientens bevægelse.

Let at håndtere

Det delte dækpapir gør applikation hurtig og nem.

Økonomisk i brug

Det store udvalg af bredder giver mulighed for valg af den rette størrelse.

INDIKATIONER

- 1) Fiksering af forbindinger
- 2) Fiksering af sonder, katetre etc.
- 3) Beskyttelse af dræn


PRÆSENTATION

HYPAFIX leveres individuelt pakket i dispenser-æske.


* Varemærker tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew 2000



1 Afklip et passende stykke HYPAFIX.

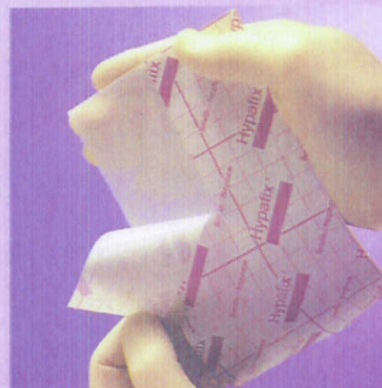

2 Fjern beskyttelsespapiret. Skæringen i midten gør det nemmere at fjerne papiret fra tapen. Alternativt kan man fjerne lidt af papiret, fæstne tapen og tilsidst fjerne resten.

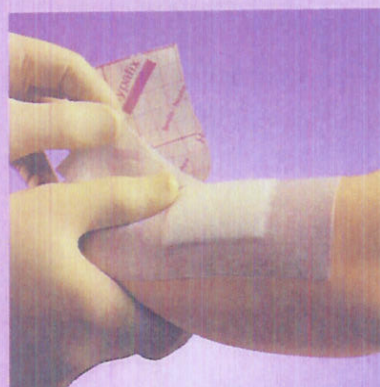


3 Placer HYPAFIX og tryk den forsigtigt fast på huden. Undgå at strække tapen.



PAKNING

Varenr.	Størrelse	Indhold
350100	2,5cm x 10m	60 rl.
350150	5cm x 10m	24 rl.
350200	10cm x 10m	12 rl.
350250	15cm x 10m	12 rl.
350300	20cm x 10m	6 rl.
350350	30cm x 10m	6 rl.

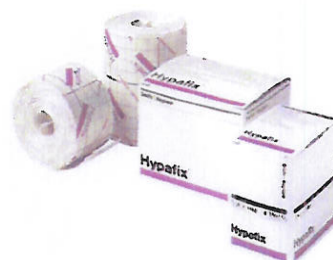

Smith+Nephew
First Choice in Wound Management

Smith & Nephew A/S
Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum
Tlf. 45 80 61 00 Fax 45 80 61 51