


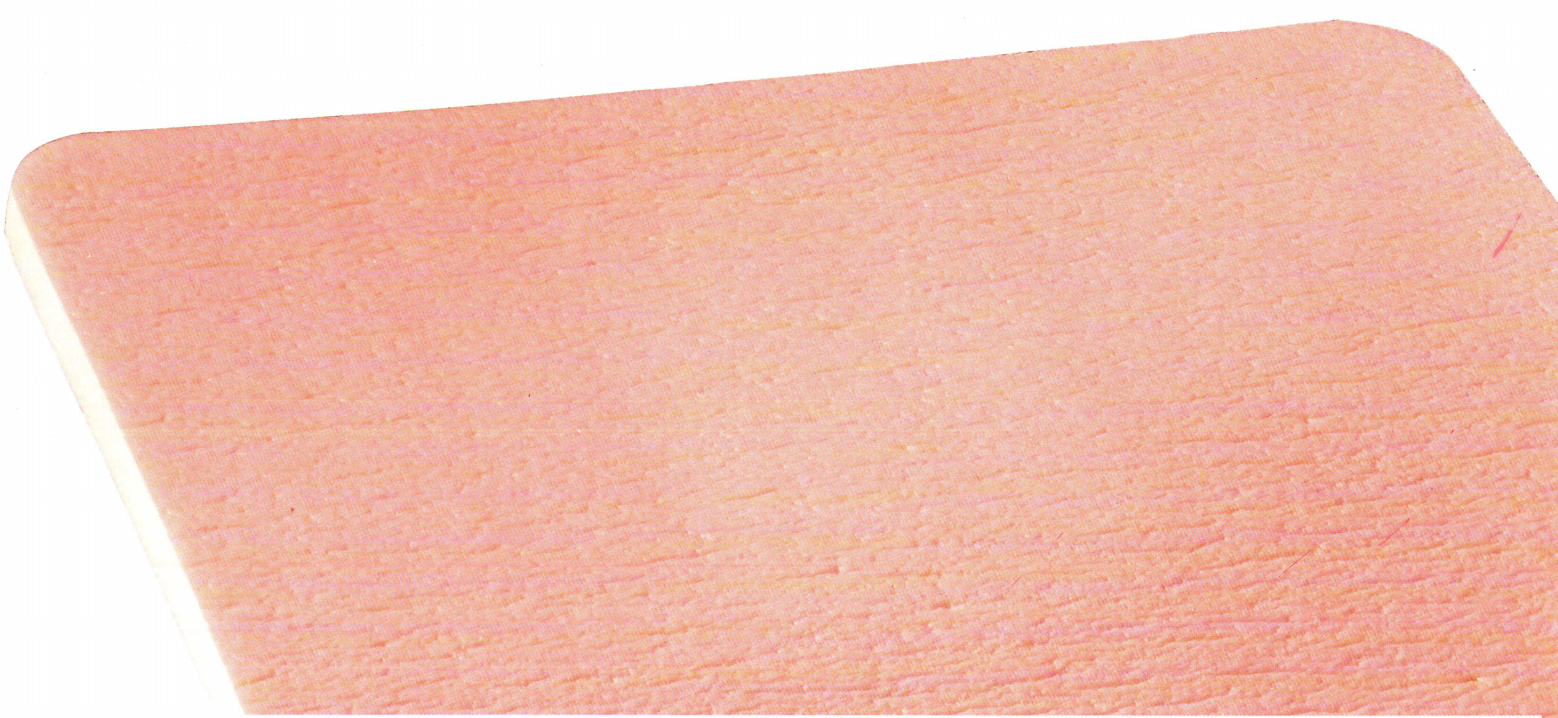

Blød og behagelig, ikke-klæbende
forbinding med høj absorbtion

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
NON-ADHESIVE
Non-adhesive Hydrocellular
Polyurethane Dressing

ALLEVYN[®] Non-Adhesive er en blød og behagelig, ikke-klæbende forbindelse med høj absorption

ALLEVYN Non Adhesive er en ikke-klæbende, absorberende forbindelse, som består af 3 lag: Et ikke-klæbende sårkontaktlag, en høj-absorberende hydrocellulær kerne og en ydre film, som er vand- og bakterietæt.

ALLEVYN Non Adhesive skaber optimale forhold for fugtig sårheling. Resultatet er hurtigt, smerte- og problemfri heling af sår, som normalt kan være vanskelige at behandle.

Fordele

Høj-absorberende

In-vitro studier og kliniske studier har vist, at forbindingen kan sidde på såret i op til 7 dage afhængig af mængden af eksudat. Dette skyldes en kombination af flere egenskaber:

- Det perforerede sårkontaktlag tillader selv tyktflydende sårsekret at passere ind i forbindingen.
- Den unikke hydrocellulære kerne som kan absorbere op til 5 gange mere end hydrokolloider, alginater og andre skumforbindinger. Det absorberede sårsekret holdes fast i forbindingen pga. den cellulære absorption.
- Den ydre films semipermeable egenskab, der tillader en fordampning fra forbindingen.
- Resultatet er dannelsen af et optimalt miljø for fugtig sårheling.

Hænger ikke i såret

ALLEVYN Non Adhesive's unikke sårkontaktlag forhindrer forbindingen i at fæstne til såret.

Skaber et optimalt fugtigt miljø

Det yderste lyserøde lag i ALLEVYN Non-Adhesive er en semipermeabel film. Dette er medvirkende til at skabe et fugtigt miljø under forbindingen, hvilket forhindrer dannelsen af en tør sårskorpe. Det fugtige miljø fremmer hurtig, smerte- og problemfri heling. Det yderste lag er vand- og bakterietæt, hvilket beskytter såret mod kontamination.

Ikke-klæbende

ALLEVYN Non Adhesive har et ikke-klæbende sårkontaktlag, og er derfor særligt velegnet til sår med skrøbelig omliggende hud, f.eks. venøse bensår. Fikseringsmetoden afhænger af den omliggende huds status, eksempelvis hudvenlig tape på intakt hud eller filmforbinding som OPSITE[®] FLEXIFIX[®].

Enkelt at anvende

ALLEVYN Non Adhesive er meget smidig og kan klippes til så den passer til sårets facon. Forbindingen absorberer og holder på sårvæske og cellerester, hvilket giver hurtige og rene forbindsskift. Der efterlades ingen rester af forbindelse i såret. Mængden af absorberet sårvæske kan følges gennem den ydre film.

Blød og behagelig

ALLEVYN Non Adhesive er blød og behagelig og bidrager samtidig til aflastning af sårområdet.

Indikation


ALLEVYN Non Adhesive anvendes som primær forbindelse ved behandling af granulerende sår med moderat til kraftig eksudation f.eks. venøse bensår og tryksår.

Applikation

Forbindingen applikeres med den hvide side mod såret og fikseres med f.eks. OPSITE FLEXIFIX, tape eller et fikseringsbind. ALLEVYN Non Adhesive kan anvendes under en kompressionsbandage, og kan sidde på såret i op til 7 dage, afhængig af mængden af eksudat. I starten af behandlingen kræves evt. hyppigere inspektion og forbindsskift. ALLEVYN kan anvendes på inficerede sår, som er under medicinsk behandling.

Forholdsregler

ALLEVYN produkterne må ikke anvendes sammen med oxiderende midler som hypokloridopløsninger (f.eks. Euro) eller brintoverilte, da disse kan nedbryde det absorberende hydrocellulære lag.

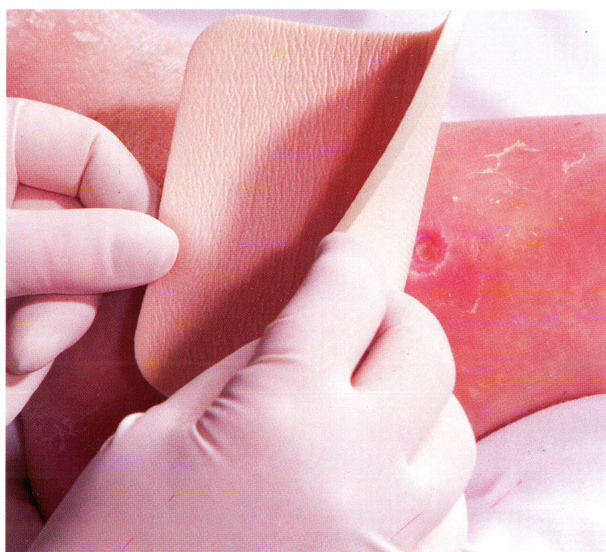

Produktsortiment

Varenr.	Størrelse	Pakning
66007643	5cm x 5cm	10
66000351	5cm x 5cm	3
66007637	10cm x 10cm	10
66000352	10cm x 10cm	3
66007335	10cm x 20cm	10
66000091	10cm x 20cm	5
66000093	15cm x 15cm	10
66000353	15cm x 15cm	3
66000038	20cm x 20cm	10
66000092	20cm x 20cm	3
66000663	70cm x 40cm	2

Wound Management www.smith-nephew.com
Smith & Nephew
Nærum Hovedgade 2
Postboks 30
2850 Nærum

T 45 80 61 00
F 45 80 61 51

[®]Trademarks of Smith & Nephew

6830/ALLEVYN/NON-ADH/SS/GLOBAL/0304/V3