


Dynamisk frigørelse af sølv

Hurtig virkning, langvarig beskyttelse




ACTICOAT[®] 7 med SILCRYST[™] Nanokrystaller


ACTICOAT 7 er en effektiv antimikrobiel barriereforbinding imprægneret med Nanokrystalliseret sølv. Overfladen af Nanokrystalliseret sølv dræber hurtigt et bredt spektrum af bakterier på kun 30 min og er effektiv i op til 7 dage. ACTICOAT 7 forbindingen består af 5 lag: 2 lag let absorberende materiale mellem 3 lag af sølv-imprægneret Polyethylen-net. Nanokrystalliseret sølv beskytter såret mod bakteriel kontamination medens inderkernen opretholder et fugtigt miljø.

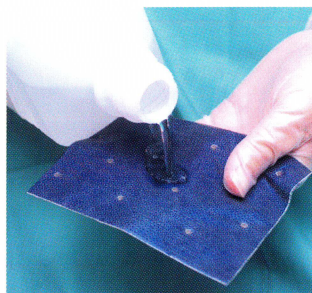

Før applikation fugtes ACTICOAT 7 med sterilt vand eller postevand (Brug ikke saltvand).

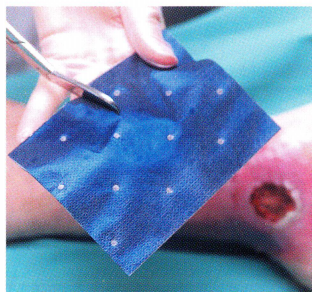

ACTICOAT 7 kan klippes i passende størrelse og form.

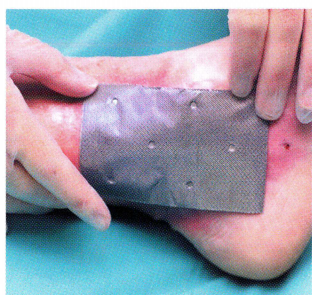

Appliker forbindingen med den blå side nedad mod såret. Dæk med en sekundærforbinding.



ACTICOAT 7 kan anvendes under kompression.

Fordele

Antimikrobiel barriereforbinding med Nanokrystalliseret sølv

ACTICOAT 7 forbindingen yder en unik beskyttelse af såret.

Effektiv barriere mod bakteriekolonisering

ACTICOAT 7 beskytter såret effektivt mod mikroorganismer.

Bredt spektrum af antimikrobiel aktivitet

(*In-vitro* data viser) at ACTICOAT 7 er en effektiv barriere mod mere end 150 forskellige patogener, hvilket inkluderer et bredt spektrum af gram-positive og negative bakterier samt svampepatogener.

ACTICOAT 7 er også en effektiv barriere mod antibiotika resistente *Pseudomonas*, Methicillin resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA) og Vancomycin resistente *Enterococcus* (VRE).

Hurtighed

In vitro data har vist at ACTICOAT 7 hurtigt dræber bakterier på 30 minutter - hvilket er hurtigere end andre former for sølv.

Reducerer risikoen for sårinfektion

ACTICOAT 7 dræber patogene organismer i såret og reducerer risikoen for tilbagevendende bakteriekolonisation og bakteriel belastning i såret, hvilket reducerer risikoen for sårinfektion.

Fremmer helingsprocessen

ACTICOAT 7 bidrager til effektiv **Wound Bed Preparation**, hvilket medvirker til en hurtigere sårheling.

Kontinuerlig frigivelse af sølv i 7 dage

Den kontinuerlige frigivelse af sølv sørger for at ACTICOAT 7 er effektiv i min. 7 dage.

Let at anvende

Let at applikere og fjerne. Kan klippes i passende størrelser.

Ikke-klæbende

Forbindsskift er mindre traumatiske end ved andre traditionelle forbindinger, både for patienten og plejepersonalet.

Indikation

ACTICOAT 7 forbindingen anvendes som antimikrobiel barriere til sår med del- eller fuldhudstab såsom tryksår, venøse bensår, diabetiske fodsår, forbrændinger samt donorsteder. ACTICOAT 7 kan bruges på inficerede sår. Hvor produktet bruges på inficerede sår, skal såret tilses og behandles efter lokal protokol.

Kontra-indikationer

Må ikke bruges på patienter med kendt allergi overfor sølv.

Må ikke bruges i forbindelse med MR-scanning (Magnetisk resonans).

Forholdsregler

Kun til udvortes brug

ACTICOAT 7 er ikke kompatibel med olie-baserede produkter som vaseline/paraffin.

Undgå kontakt med elektroder eller elektrode geler under elektroniske målinger, f.eks EEG og EKG.

Brug ikke produktet hvis overfladen på forbindingen er misfarvet.

Bestilling af ACTICOAT 7

Varenummer	Størrelse	Pakning
66000809	5 cm x 5 cm	5
66000796	10 cm x 12,5 cm	5
66000797	15 cm x 15 cm	5

References

1. Wright JB et al. Wounds 1998;10(6):179-188.
2. Yin HQ et al. J Burn Care Rehab 1999;20(3):195-200.
3. Wright JB et al. Am J Infect Control 1998;26:572-577.
4. Wright JB et al. Am J Infect Control 1999;27:344-350.
5. Tredget EE et al. J Burn Care Rehabil 1998;19:531-537.
6. Data on file

Wound Management
Smith & Nephew
Medical Ltd
101 Hessle Road,
Hull HU3 2BN, UK
T 44 (0) 1482 225181
F 44 (0) 1482 328326

www.smith-nephew.com
www.acticoat.com