

Cica-Care*

Smith+Nephew

Selvklæbende gel-plade til arbehandling



Før:



Spredte områder af hypertrofiske ar forårsaget af kogende vand. Arrene er 2 år gamle. Arret i skulder-regionen behandles med CICA-CARE.

Efter:



Hypertrofisk ar efter 5 måneders behandling. Arret er nu lysere i farven og viser en mærkbar udfladning.

Selvklæbende gel-plade til arbehandling

- Selvklæbende
- Holdbar
- Formbar
- Kan genanvendes
- Økonomisk i brug
- Nu mere flexibel

CICA-CARE er en blød, selvklæbende, okklusiv silikone gel-plade lavet af medicinsk silikone forstærket med en silikone membran på bagsiden. CICA-CARE er udviklet til behandling af både gamle og nye hypertrofiske keloïder og ar og til forebyggende behandling af lukkede operations-sår. Udover at CICA-CARE mindsker rødme og fortykkelse af ar, har CICA-CARE to væsentlige fordele: produktets holdbarhed og klæbende egenskaber¹. Produktet har derfor en høj patientkomfort og er samtidig økonomisk i brug.

FORDELE

Selvklæbende

CICA-CARE pladen er selvklæbende på den ene side, mens den anden side støttes af en tynd silikone-membran. Det er derfor muligt at anvende pladen uden ekstra fiksering.

Holdbar

Kombinationen af silikone membranen og gelen gør CICA-CARE meget holdbar og forhindrer samtidigt, at pladen „smuldrer“, som det er set med andre silikone plader^{1,2}.

Formbar

CICA-CARE tilpasser sig kroppens konturer og kan med sine selvklæbende egenskaber let tilpasses til anatomisk vanskeligt tilgængelige områder, f.eks. på øreflip og brystbenet.

Kan genbruges

Et stykke CICA-CARE kan genbruges, uden at pladen ændrer udseende eller klæbeegenskaber. Når pladen bliver vanskelig at rengøre, bør et nyt stykke tages i brug. Et stykke kan normalt anvendes i op til 28 dage.

Økonomisk i brug

Produktets holdbarhed og genanvendelighed gør CICA-CARE økonomisk i brug^{1,2}.

Nu mere fleksibel

CICA-CARE er blevet videreudviklet for at opnå en endnu større fleksibilitet i forhold til kroppens konturer.

APPLIKATION

CICA-CARE kan klippes til, så pladen tilpasses det enkelte ar. Pladen lægges direkte på arret uden at strække den. Selvom CICA-CARE er selvklæbende, kan den holdes på plads med en let elastisk bandage (f.eks. EASIFIX* Cohesive) eller fikseringsplaster (f.eks. HYPAFIX*). For at vænne huden til CICA-CARE bør man de første 2 dage have CICA-CARE på i ca. 4 timer dagligt og ca. 8 timer på 3-4 dagen. Herefter øges antallet med 2 timer dagligt, da det optimale resultat opnås ved behandling døgnet rundt. Rekvirér brugsanvisning.

FORHOLDSREGLER

Hvis huden under silikone pladen ikke er ren, eller hvis produktet applikeres for stramt, kan nogle patienter reagere med hudirritation. Skulle huden reagere med hudirritation reduceres behandlingstiden til 12 timer efterfulgt af 12 timer uden silikone pladen. Observeres fortsat hudirritation stoppes behandlingen og en læge bør konsulteres. På kirurgiske sår bør CICA-CARE kun anvendes efter suturerne er fjernet.

INDIKATIONER

- Behandling² og/eller forebyggelse⁴ af både gamle og nye hypertrofiske keloïder og ar.
- Operationssår efter suturfjernelse

KONTRA-INDIKATIONER

CICA-CARE bør ikke anvendes på beskadiget hud. MÅ IKKE ANVENDES PÅ HUD MED AKNE I UDBRUD. MÅ IKKE ANVENDES PÅ ÅBNE ELLER INFICEREDE SÅR.



REFERENCER

- (1) Carney, SA et al. CICA-CARE Gel Sheeting in the Management of Hypertrophic Scarring. BURNS, (1994), 20, (2): 163-167.
- (2) Donald L. Comparison of 2 types of silicone gel sheets. Australian/New Zealand. BURNS Association (ANZBA) 14: 10-11
- (3) Quinn J.K. BURNS (1987) 13, 533-540
- (4) Cruz-Korchin NI. Effectiveness of silicone sheets in the prevention of hypertrophic breast scars. Ann Plast. Surg. (1996), 37: 345-348

PRÆSENTATION

Hver plade leveres individuelt pakket.

* Varemærker tilhørende TJ Smith & Nephew Ltd.

Smith+Nephew
First Choice in Wound Management

Smith & Nephew A/S
Nærum Hovedgade 2
2850 Nærum
Tlf. 45 80 61 00
Fax. 45 80 61 51
www.smith-nephew.com/dk
www.cicacare.com

PAKNING		
Varenr.	Størrelse	Antal
66250707	12 x 15 cm	æske á 10 stk.
66250706	12 x 15 cm	æske á 1 stk.
66250704	12 x 6 cm	æske á 1 stk.

