


Remove*

Smith+Nephew

Klæbemasse Fjerner

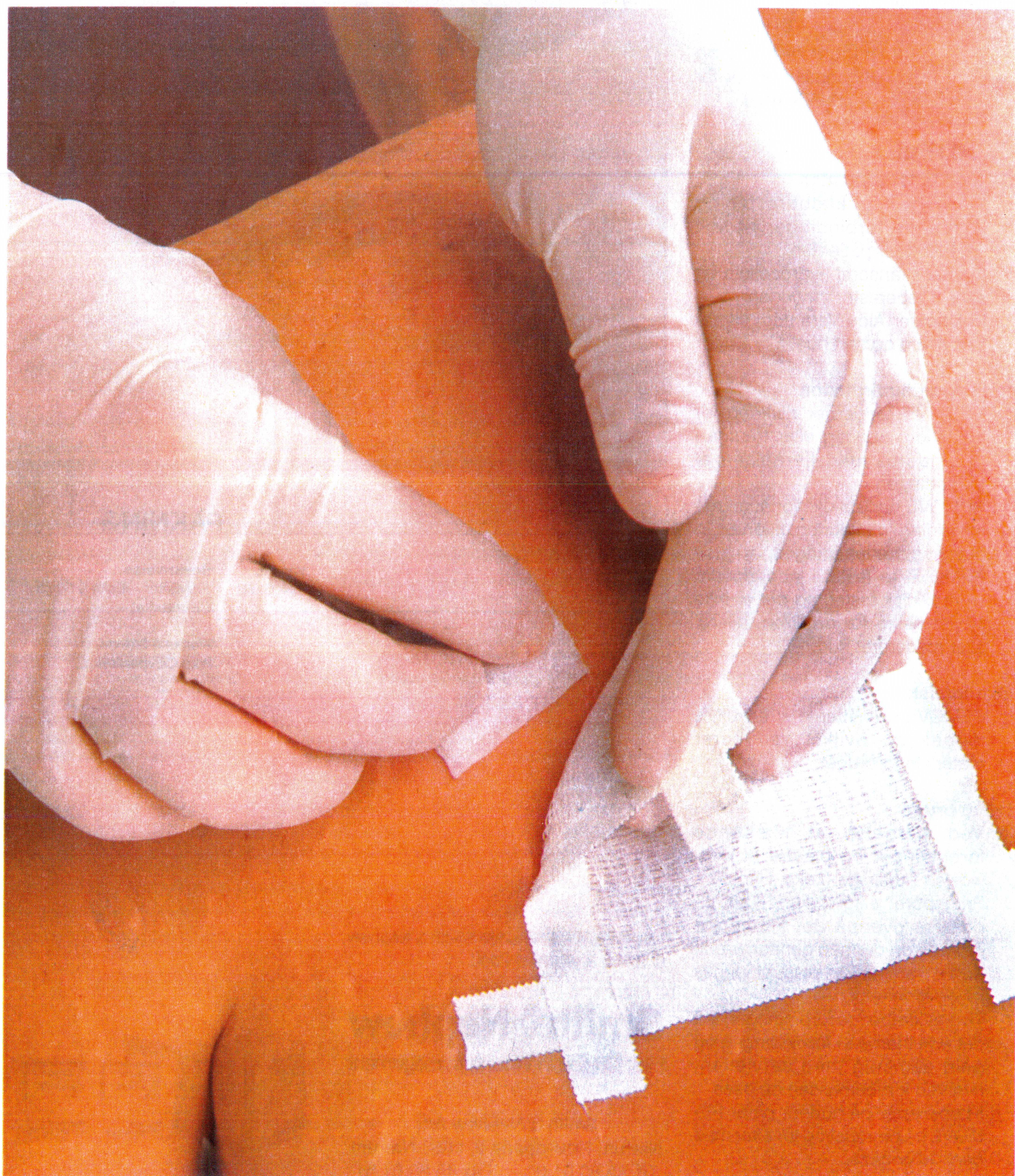

Remove

Klæbemasse Fjerner

- Behagelig for patienten
- Økonomisk
- Reduceret hudirritation
- Let at anvende

REMOVE er et led i Smith & Nephew's hudpleje program; designet til at give den optimale patient komfort og samtidig være økonomisk og let for plejepersonalet at arbejde med.

FORDELE

Behagelig for patienten

- * Fjernelsen af klæberester og klæbende forbindinger er helt smertefrit for patienten.
- * Fjerner skånsomt hydrocolloid og akryl klæberester fra huden.
- * Indeholder Aloe Vera som tilfører fugt til øm og sart hud.

Reduceret hudirritation


- * REMOVE reducerer risikoen for irritation, ubehag eller trauma i forbindelse med fjernelsen af forbindingen.
- * REMOVE er tilsat olie for at undgå affedtningen af huden, hvorved irritation af huden undgås.
- * REMOVE er testet i laboratorium samt klinisk testet, og der er ikke påvist risiko for irritation, allergi eller macereret hud.

Økonomisk

- * REMOVE servietterne er enkeltvis indpakket, hvilket reducerer materiale forbruget.

Let at bruge

- * Ved fjernelse af klæbende forbindinger og plastre af non-woven materiale (f.eks. Hypafix*, Primapore* e.lign.), kan REMOVE påføres ovenpå det klæbende område og dermed gennemvæde dette. Herefter kan plastret fjernes let og smertefrit.
- * Øvrige klæbende forbindinger; løft det ene hjørne af forbindingen og gnid samtidig med servietten, hvorved klæbemassen opløses
- * Klæberester på huden; påfør REMOVE på området og tør efter med papir eller gaze.

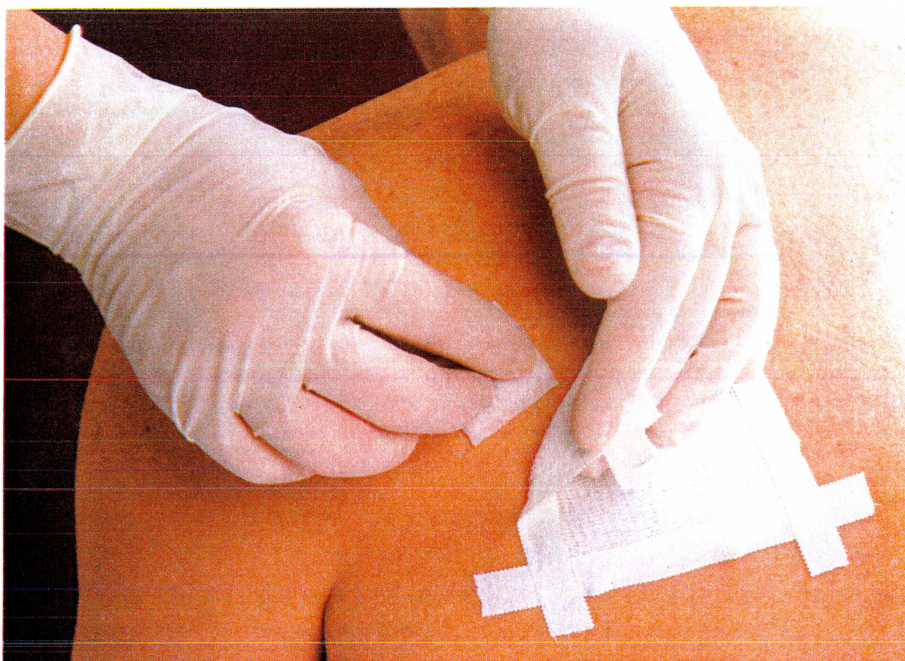

PAKNING

Varenr.
59403195

Beskrivelse
Servietter - Æske á 50 stk.
CE-mærket

Flaske á 236 ml.
Ikke CE-mærket

* Varemærker tilhørende Smith & Nephew
© Smith & Nephew 2000

Smith+Nephew
First Choice in Wound Management

Smith & Nephew A/S
Nærum Hovedgade 2, 2850 Nærum
Tlf. 45 80 61 00 Fax 45 80 61 51

