

Før**Efter****Blød fibrin****Hyper keratose,
staseeksem, tør og
skællende hud****Akutte sår, stik
og snitsår,
hudafskrabninger****Hæmatom
diabetisk fodsår****TIDSBESPARENDE!**

Mekanisk debridering og oprensning er den hurtigste metode; med Debrisoft tager det i gennemsnit 2-4 minutter at debridere.

TRYGHED FOR PATIENTEN

Debrisoft fjerner skånsomt og selektivt blød fibrin, avitalt væv og hyperkeratose.

EFFEKTIVITET

Sår og debris er ideel grobund for bakterier og infektion. Ved aktivt og hurtigt at fjerne debris med Debrisoft kan såret samt hudomgivelser let vurderes i forhold til helingsprocessen².

BESPARELSER

Ifølge NICE vejledning fra marts 2014 kan anvendelse af Debrisoft i U.K. resultere i besparelser på 15.000.000 pund per år, per patient er det 484 pund², som svarer til ca. 4.500 DKK.

Det er dokumenteret at mekanisk debridering (oprensning ved direkte/ fysisk kontakt med sårbund og sår/hudomgivelser) og anvendelse af Debrisoft giver hurtigere oprensning i sårbehandling, færre besøg af den sundhedsprofessionelle, og ikke mindst mindre ubehag for patienterne sammenlignet med andre oprensningsmetoder.

2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2014) The Debrisoft monofilament debridement pad for use in acute or chronic wounds. London: NICE. Available at: guidance.nice.org.uk/mtg17



HVORNÅR ANVENDES DEBRISOFT®?

Debrisoft består af et blødt sårkontaktlag med absorberende polyesterfibre med syet kant og forstærket bagside. Disse særlige monofilament fibre er produceret og skåret med en speciel vinkel, længde og tykkelse, der sikrer god effekt og fleksibilitet i sårbehandlingen med henblik på debridering af sårbund, sårrende samt hudomgivelser.

INDIKATIONER

- Debridering og oprensning af akutte og svært helende sår, hudomgivelser, og tilstødende hudlidelser såsom hyperkeratose eller hudafskrabbinger hos børn og voksne
- Kan anvendes til at klargøre sårbunden forud for sårvurdering eller med henblik på mere nøjagtig behandling eller tryksårskategorisering

VÆVSTYPER

- Avitalt væv, celleaffald/debris, blod fibrin, hyperkeratose, hæmatom, andre sår samt evt. bandagerester

SÅRTYPER

- Tryksår, bensår (arterielle-, venøse- samt blandingssår), diabetiske fodsår, akutte sår (skadestue patienter med hudafskrabbinger/ asfalt eksem), vaskulitsår, immunologiske sår, erysipelas, stase-eksem, svært helende sår, stik og snitsår hos misbrugere


HVOR OG HVEM KAN ANVENDE DEBRISOFT?

- Debrisoft kan anvendes alle steder; i patientens/borgerens hjem, ambulatorier, klinikker og hospitalsafdelinger. Debrisoft kan anvendes af alle sårbehandlere også sundheds-professionelle uden specialuddannelse

SELVBEHANDLING

- Efter en positiv vurdering af patientens evne til egenomsorg samt passende instruktion i anvendelse af Debrisoft, kan patienten i nogle tilfælde selv debridere hyperkeratose, skællende tør hud og nogle former for svært helende sår

HVORDAN ANVENDES DEBRISOFT®?

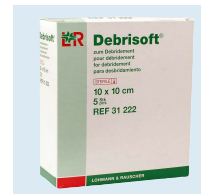

TRIN 1

For bedste resultat anbefales det først at rense sår og hudomgivelser i henhold til lokale retningslinier - herefter anvendes Debrisoft

- Fjern/vask ALLE cremer eller fugtighedscremer fra huden og såret
- Bland ikke cremer med det vand der bruges til at fugte Debrisoft



TRIN 2

Åbn den sterile Debrisoft og fugt den med 30 ml lunken vandhanevand¹ eller saltvand (ihh. til lokale retningslinjer). Der er ikke brug for en skål.

- Debrisoft må ikke lægges i blod
- Debrisoft må ikke gøres over-våd
- Debrisoft må ikke vrides

¹ (jvf. www.kliniskeretningslinjer.dk/media/346278/rensning_af_akutte_og_kron_s_r.pdf)



TRIN 3

Ved hjælp af et let tryk i en fejende eller cirkulær bevægelse på såret og/eller hudomgivelserne, renses/debrideres forsigtigt med det bløde sårkontaktlag af den fugtede Debrisoft.

OBS

- Debrisoft er et engangsprodukt. Anvend én Debrisoft for hvert sår/hudomgivelser og bortskaf den brugte Debrisoft med almindelig dagrenovation eller sygehusaffald
- Debrisoft er latex-fri

DEBRISOFT® TIPS OG GODE RÅD

✓	Foretag en helhedsvurdering af patienten og såret før Debrisoft tages i brug i sårbehandlingen.
✓	Vi anbefaler ved opstart tre på hinanden efterfølgende behandlinger med Debrisoft og herefter én gang ugentligt.
✓	Vask alle cremer eller fugtighedscremer af huden/såret før brug af Debrisoft.
✓	Brug Debrisoft hvor avitalt væv, celleaffald/debris, blod fibrin eller hyperkeratose er fremtrædende. Ved svært helende sår, mistanke om biofilm, og/eller som sårvurderingsredskab.
✓	Efter brug af Debrisoft, revurder såret/huden, før du vælger en passende sårbandage/kompression.
✓	I en periode kan det være nødvendigt at anvende Debrisoft ved hvert bandageskift for at opnå fuldstændig debridering.
✓	Større områder kan tage længere tid at behandle, afhængig af mængden af debris, fibrin eller hyperkeratose mm. Mere end ét styk Debrisoft kan være nødvendig i disse tilfælde.
✓	Ved tilfælde af meget hård nekrose eller store mængder af keratose og avitalt væv, anbefales kirurgisk og biokirurgisk eller autolytisk debridering inden anvendelse af Debrisoft.
✗	Debrisoft er ikke en bandage og bør ikke efterlades på såret.
✗	Klip ikke i Debrisoft.
✗	Debrisoft må ikke anvendes såfremt der er kendt overfølsomhed for produktets komponenter (100% polyester fibre, sikret med polyacrylat).
✗	Brug ikke Debrisoft på sår med hård nekrose.