



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ 1614 og 1616

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ 1614 og 1616 er specielt designet til fiksering af epiduralkatetre. Produkter består af en tynd polyuretanfilm forbindelse med en blød tekstilkant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr.

Egenskaber:

- Specielt design gør det nemmere at applicere på epiduralkatetre
- Sterile strips for bedre fiksering af kateterudstyr
- Blød tapekant giver bedre patientkomfort og forebygger kantrulning
- Giver en sikker barriere imod udefra kommende bakterier, væsker og virus*
- Fungerer som badeplaster
- Semipermeabel
- Stabiliserer kateteret og fikserer det effektivt
- Tillader daglig inspektion af indstiksstedet

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Fremragende klæbeevne
- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan komme ud.

Indikationer:

- Epiduralkatetre
- Tunnelerede katetre
- Dialyse katetre

OBS:

Anvendelse af enhver forbindelse til fiksering af forskellige katetre bør indgå i en veldefineret protokol for kateterbehandling til forebyggelse af infektion.



3M

Brugsvejledning:

- Åben pakningen og fjern den sterile forbindelse
- Fjern den fortrykte liner fra klæbefladen
- Placér forbindingen over katetret og applicer fra midten og udefter
- Fjern rammen omkring filmen. Følg den med en finger rundt langs med kanten, hverved undgå kantrulninger, og unødige forbindskift undgå
- Notér datoen for forbindskift på tapeetikken og i sårjournalen.

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber
- Forstærkede del og tapestrips: Polyesterfibre

Bestillingsinformation**3M™ Tegaderm™ 1614 og 1616**

Varenr.:	Størrelse i cm	Antal/æske	Æsker/karton
1614	6 x 7 cm	100	4
1616	10 x 12 cm	50	4