



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

Coban™ 2-lags kompressionsbehandling

Produktbeskrivelse:

3M Coban™ 2-lags kompressionsbehandling består af 2 lag. Et komfortlag med et adhesive materiale og et tyndt selvklæbende kompressionsbind. Bandagen sidder sikkert uden ekstra brug af fiksering, fordi de 2 lag hæfter til hinanden.

Egenskaber:

- Effektiv og graderet kompression
- Sikker og stabil subbandagestryk
- Hurtig ødemreducing og derfor hurtigere sårheling
- Løsner sig ikke, minimal nedglidning
- Komfortabelt for patienten
- Mulighed for at anvende eget fodtøj
- Hurtig og nem at anlægge for personalet
- Kan sidde på benet i op til 7 dage
- Latex-fri

Indikationer:

- Ordineret kompressionsbehandling
- Venøse bensår og lignende tilstande
- Ankel/armindex > 0,8

Brugsvejledning:

Kompressionsbehandling er altid en lægeordineret behandling. Komfortlaget lægges med skumlaget mod huden med cirkulær teknik og kun minimal overlapning. Hælen skal ikke lukkes. Foden holdes i en vinkel på 90° under anlæggelsen. Kompressionsbindet anlægges med fuldt stræk og med cirkulær teknik 50% overlapning. Hælen lukkes 2-3 gange, de 2 lag moduleres sammen med hænderne, hvorefter bindene hæfter på hinanden og ekstra fiksering er derfor ikke nødvendig. OBS! Coban 2-lags kompressionsbind skal anvendes med behandlingsstedet retningslinier for sårbehandling.



3M

Deklaration:

- Skumlaget består af: polyurethan skum beklædt med et selvhæftende lag, latex-fri
- Kompressionsbindet består af: polyster fibre, spandex elastikgarn, latex-fri
- Coban 2-lagskompressionsbehandling er til engangsbrug

Bestillingsinformation**3M™ Coban™ 2-lags kompressionsbehandling**

Varenr.:	Størrelse cm x m	Antal/æske	Æsker/karton
2094	Skumlag: 10 cm x 2 meter Kompressionsbindet: 10 cm x 4.5 meter fuld stræk	1 sæt	8