



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ HP

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ HP er en steril film til sår og sårbehandling. Den består af en tynd, transparent, semipermeabel film som giver god hudbeskyttelse og sikrer en fugtig sårheling. Tegaderm™ serien er udviklet i forskellige størrelser og design for at imødekomme en god forbindelse til vanskelige bandagerbare steder.

Egenskaber:

- Kan anvendes i op til 7 dage
- Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø
- Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus*
- Elastisk
- Transparent. Inspektion af såret hindrer unødige skift af forbindingen, hvorved sårhelingen kan fortsætte uforstyrret
- Beskytter mod friktion
- Specielt design i form af oval eller sacral pasform gør det lettere at forbinde vanskelige bandagerbare steder, så som albuer, hæle, sacrum og hofterne

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Fremragende klæbeevne
- Nem at applicere med rammesystem
- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan komme ud.
- Nem at fjerne

Indikationer:

- Rene kirurgiske sår
- Donorsteder
- Tryksår stadie I og II
- Yderforbinding over alginater, hydrogeler og hydrofibre
- Overfladiske sår, som hudafskrabning, blæner, rifter og snitsår



3M

Indikationer:

- 1. og 2. grads forbrændinger
- Forebyggende hudbeskyttelse
- Anvend 3M Tegaderm™ + Pad med en absorberende forbindelse, hvor det er nødvendigt på grund af store mængder sekretion
- Anvend 3M Tegaderm™ HP ved særligt krævende situationer med meget fugtig hud (febril patienter eller svedende patienter). Tegaderm™ HP har en ekstra god klæbeevne.

OBS: Anvendelse af enhver forbindelse til sår bør indgå i en veldefineret protokol for sårbehandling til forebyggelse af infektion.

Brugsvejledning:

- Vælg det rette produkt i Tegaderm™ serien
- Rens såret og den omkringliggende hud. Applicér altid Tegaderm™ på tør, ren hud
- Åben pakningen og fjern den sterile forbindelse
- Fjern den fortrykte liner fra klæbefladen
- Placer forbindingen over sårområdet og applicer fra midten og udefter. (forbindingen må aldrig strækkes inden applicering)
- Fjern rammen omkring filmen. Følg den med en finger rundt langs med kanten, herved undgå kantrulninger og unødige forbindelskift undgå
- Notér datoen for forbindelskift på tapeetikken eller i sårjournalen

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber

Bestillingsinformation**3M™ Tegaderm™ HP**

Varenr.:	Størrelse i cm	Antal/æske	Æsker/karton
9534HP	6 x 7 cm	100	4
9536HP	10 x 12 cm	50	4
9543HP	11 x 12 cm	12	4
9545HP	5,4 x 6,4 cm	50	6
9546HP	10 x 11,5 cm	50	4
9548HP	14 x 16,5 cm	10	8