



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Alginate

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Alginate er en calcium alginat forbindelse (>95% calcium) fremstillet på basis af brunt blæretang. Når Tegaderm™ Alginate kommer i kontakt med sårsekret dannes en fugtighedsbevarende og beskyttende gel, som yder et fugtigt sårhelingsmiljø.

Egenskaber:

- Kan absorbere 14 til 20 gange sin egen vægt, hvilket bevirker at forbindingen er effektiv i længere tid.
- Er blød og smidig

Fordele:

- Produktet kan fjernes i et stykke uden at efterlade rester i såret.
- Opretholder et fugtigt sårmiljø.
- Kan anvendes sammen med kompression

Indikationer:

3M Tegaderm™ Alginate, alginatforbinding kan anvendes på moderat til kraftigt væskende sår, f.eks.:

- Tryksår
- Diabetes sår
- Venøse/arterielle fase og bensår
- Donorsteder
- Traumesår
- Hudafskrabninger
- Kirurgiske incisioner
- Cancer sår

Advarsel:

Hvis det er nødvendigt at fjerne alginaten fra såret, før den er mættet med sårsekret, bør alginaten mættes med evt. NACL først.

3M Tegaderm™ Alginate bør ikke anvendes på sår med minimal eksudat, da udtørring kan bevirke at forbindingen klæber til såret.

3M Tegaderm™ Alginate bør ikke anvendes over 3. grads forbrændinger.



3M

Brugsvejledning:

1. Rens og skyl såret og den omkringliggende hud efter gældende retningslinier. Anvend evt. 3M Cavilon™ No Sting barrierefilm som hudbeskyttelse.
2. Vælg en forbindelse som passer til sårets størrelse. Tegaderm™ Alginate kan klippes eller foldes så den passer til såret.
2. Applicer forbindingen i såret med minimal overlapning på såromgivelserne.
3. Dybe sår pakkes løst.
4. Dæk såret med en yderforbinding (f.eks. 3M Tegaderm™ forbinding, Medipore +Pad eller Tegaderm™ +Pad eller 3M Medipore).
5. Skift forbindingen efter behov, eller ved sivning og lækage. Forbindingen kan fjernes ved hjælp af en pincet eller ved at skylle den væk.
6. Hvis forbindingen virker tør skal den gennemvædes med steril NACL inden forbindingsskift.

Holdbarhed og opbevaring:

Produktet bør opbevares ved stuetemperatur (15 - 30°C).

Holdbarhed: Se udløbsdatoen på pakningen.

Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ Alginate

Varenr.:	Størrelse cm x cm	Antal/æske	Æsker/karton
90110	5 x 5	10	10
90112	10 x 10	10	5
90114	10 x 20	5	4
90120	30,4 x 2 (2g)	5	4