

3M™ Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding

Overvejelser

- Observer sårforbindingen kontinuerligt. Da forbindingen er absorberende, vil sårvæsken blive ledt op til den øverste del af forbindingen, som derfor kan ændre farve. Når sårvæsken breder sig til forbindingens kanter, eller forbindingen begynder at lække, skal den skiftes.
- Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding kan blive siddende i op til syv dage. Hyppigheden af forbindingsskift afhænger af sårtypen, mængden af sårsekret og den kliniske situation. Forbindingen skal skiftes mindst hver 7. dag eller i henhold til sårbehandlingsproceduren.
 - Forbindingen kan bruges som en absorberende topforbinding over sårcaavitetsmaterialer som f.eks. alginater eller hydrofibre.
 - Forbindingen kan klippes til efter behov alt efter sårets størrelse og konturer. Brug af ikke-sterile produkter kan øge risikoen for kontamination og infektion.
 - Hvis hele sårforbindingen dækkes med okklusiv tape, kan det nedsætte permeabiliteten af den øverste topfilm. For at bevare fordampningsevnen, er det kun kanterne af forbindingen, der må tapes, ligesom en billedramme.

Bestillingsinformation

	Varenr.	Størrelse	Forbindinger/Æske	Æsker/Karton
	90600	5cm x 5cm	10	4
	90601	10cm x 10cm	10	4
	90602	10cm x 20cm	5	6
	90603	20cm x 20cm	5	6
	90604	8,8cm x 8,8cm Tracheostomi	10	4
	90605	10cm x 60cm, rulle	1 rulle/pakke	6 ruller

For yderligere information henvises der til vores website på www.3M.com/tegaderm, eller kontakt din 3M konsulent, eller ring til 3M Health Care 43 48 01 00.



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
www.3m.dk

3M™ Tegaderm™
Dressings

3M, Coban, Medipore, Micropore og Tegaderm er varemærker tilhørende 3M. Kan genanvendes. Trykt i U.S.A.
© 3M 2014. Alle rettigheder forbeholdes. 70-2011-5477-3
BR53/000183-1

3M™ Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding



Fremragende absorption af sårvæske


4-lags sårforbinding, som har en kraftig, justérbar sugesevne, der får fugt til at fordampe, hvilket opretholder et optimalt sårhelingsmiljø.

- Effektiv håndtering af sekret.
- Unikt design med 4 lag som tilpasser sig skiftende mængder sårsekret og nedsætter risikoen for maceration.
- Høj fordampningsevne sikrer en optimal fugtbalance i såret, der fremmer sårheling.
- Effektiv under kompression.
- Nem at anvende.



3M™ Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding

3M™ Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding er en kraftig absorberende, åndbar, ikke-klæbende sårforbinding. Den er fremstillet af en fleksibel skumpude af polyurethan, et superabsorberende non-woven lag og et toplag bestående af en film med tryk. Topfilmen er semipermeabel, hvilket forhindrer gennemsivning af sårveske fra såret og fungerer som en barriere for udefra kommende kontamination, herunder bakterier og vira.* Forbindingen bevarer et fugtigt sårmiljø, som har vist sig at fremme sårhelingen.

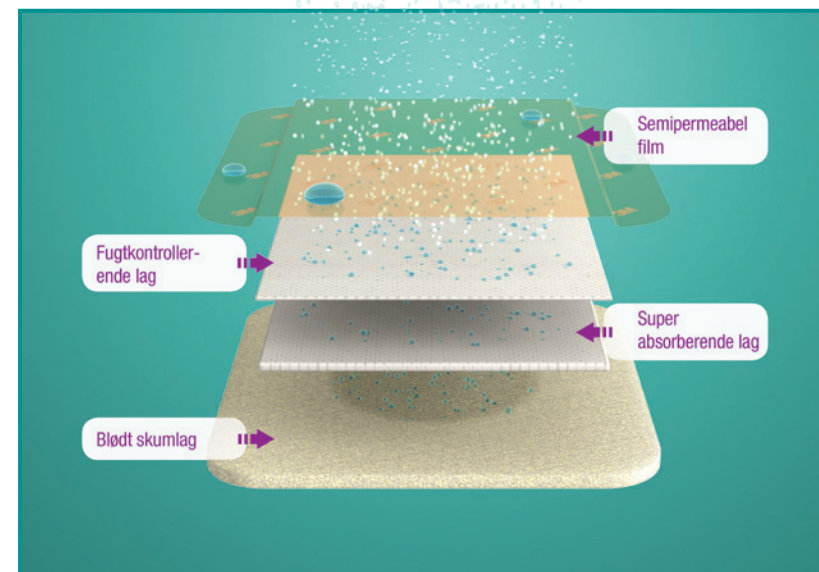

Videnskaben bag den fremragende håndtering af sårsekret i 3M™ Tegaderm™ Foam

Første lag af blødt skum, absorberer hurtigt sårsekret fra såret videre op i det næste superabsorberende lag. Herefter fordeles sårvesken i det fugtkontrollerende lag, inden den fordampes igennem den meget semipermeable topfilm.

Indikationer for anvendelse

Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding er designet til anvendes som primær eller sekundær forbinding fra minimal til kraftigt væskende sår. Sårforbindingen justerer hele tiden sugeevne efter sårsekrets mængde.

- Tryksår
- Venøse bensår, arterielle sår og neuropatiske (diabetiske) sår
- Hudlæsioner
- Donorsteder
- Kirurgiske sår
- Hudafskrabninger
- 1. og 2. grads forbrændinger
- Velegnet til brug omkring ernæringssonder
- Velegnet til brug under kompressionsbehandling


*In vitro-testning viser, at gennemsigtig film danner en viral barriere over for vira med en diameter på mindst 27 nm, samtidig med at forbindingen forbliver intakt uden lækage.

Følg den generelle sårbehandlingsprocedure og afdelingens retningslinjer for hygiejne.

Appliceringsanvisning


- 1 Rens såret og den omkringliggende hud i henhold til afdelingens retningslinjer.
- 2 Vælg en forbinding med den rette størrelse for at sikre, at skumlaget er større end sårområdet. Forbindingen kan klippes til efter sårets konturer.

- 3 Tag Tegaderm™ Foam - Ikke-klæbende skumforbinding ud af pakken.
- 4 Placer forbindingen over såret med den trykte side opad, så kanterne overlapper den intakte hud. Fastgør forbindingen med en film, tape eller anden metode.

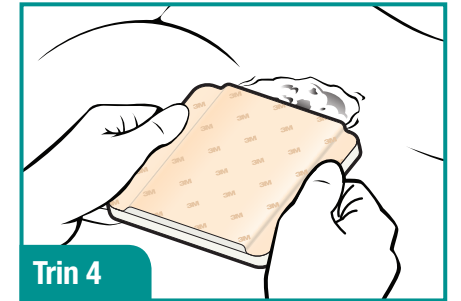


Trin 4

Fastgørelse af forbinding

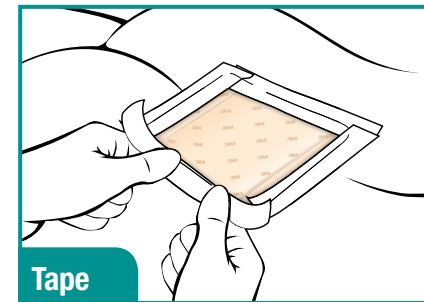


Tape

Tape: Sæt tape på forbindingen som rammen omkring et billede (3M™ Silicone Tape, 3M™ Tegaderm™ film eller 3M™ Micropore™).
Bemærk: For at bevare permeabiliteten er det kun kanterne af forbindingen, der må tapes, ligesom en billedramme.

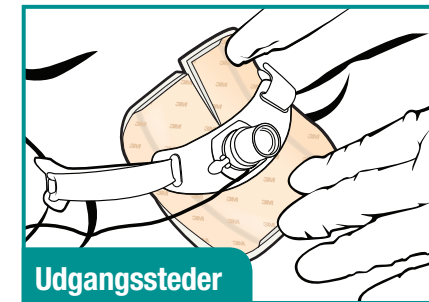


Udgangssteder

Slanger og sonder: Når forbindingen bruges til absorption og polstring omkring tracheostomi og ernæringssonder, kan forbindingen blive holdt fast af selve slangen, eller den kan fastgøres ved at sætte tape omkring kanterne af forbindingen som rammen på et billede.

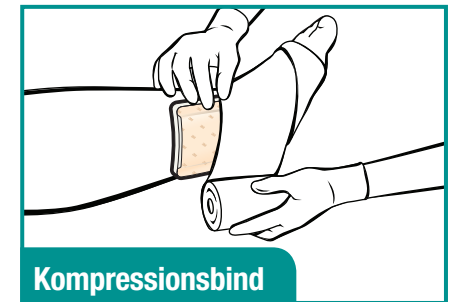

Kompressionsbind


Kompressionsbind til benene: Forbindingen kan bruges under kompressionssystemer som f.eks. 3M™ Coban™ 2-lags kompressionssystem. Det er som regel ikke nødvendigt at anvende yderligere tape.

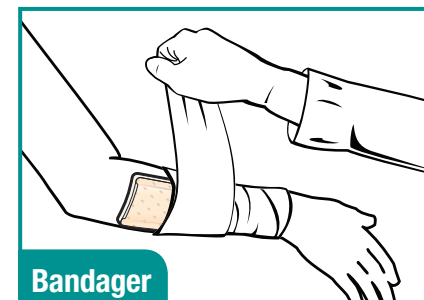

Bandager

Bandager: Når forbindingen bruges på en ekstremitet, fastgøres forbindingen med et gazebind, en selvklæbende bandage (3M™ Coban™ selvklæbende bandage), en tubebandage eller et elastikbind.

Fjernelse af sårforbinding

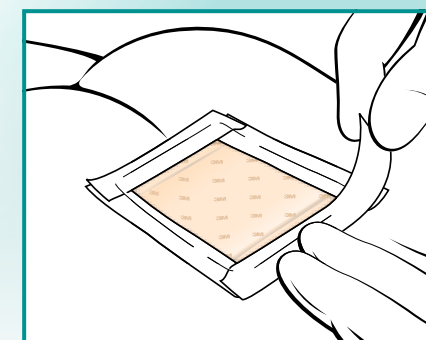

- 1 Fjern forsigtigt tapekanten eller filmen.
- 2 Løft forbindingen fra såret. Hvis forbindingen klæber til såroverfladen, vædes der med saltvand, og forbindingen løsnes forsigtigt.
- 3 Bortskaf forbindingen i henhold til gældende retningslinjer.