


Suprasorb® C- Kollagen

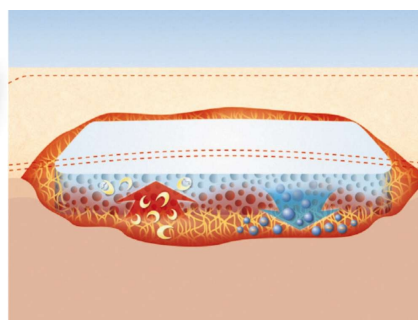

Til stagnerede sår

Produktet:

Suprasorb C kollagensvamp består af kollagen fra oksekorium (kalvehud). Kollagensvampen har en porøs struktur med udpræget kapillæraktivitet og dermed evnen til at absorbere væske. Under den rent mekaniske proces absorberes, i forbindelse med den kontinuerlige absorption af sårsekret, afstødte nekroser, bakterier og fibrinbelægninger, hvorved dannelsen af granulationsvævet fremmes.

Suprasorb C kollagensvamp kan anvendes ved stagnerende sår i alle sårhelingsfaser.

Anvendelsesområde:

Suprasorb C kollagensvamp anvendes på sår med større overfladiske vævsdefekter f.eks. brandsår, operationssår, ulcera af forskellige oprindelse og fysisk hæmostasis. Efter huddesinfektion og rensning af såret eller andre vævsdefekter tilskræres Suprasorb C i en passende størrelse og form og appliceres normalt tørt med den side, der vender nedad i pakken. Ved ringe eller manglende sekretion anbefales det at applicere Suprasorb C svampen fugtet med fysiologisk saltvand eller Ringer's væske. Et let pres fremmer kontakten med den defekte overflade.

Suprasorb C holdes på plads med Suprasorb F, Film Suprasorb M, membran eller Suprasorb H, hydrokolloid.

Sortiment:

Suprasorb C kollagensvamp

Sårsvamp

Str.	art nr.
4 x 6 x 0,8 cm	20481
6 x 8 x 0,8 cm	20482
8 x 12 x 0,8 cm	20483

LOHMANN & RAUSCHER A/S

Gøngehusvej 252

2950 Vedbæk

Tlf. 45 89 02 25

Fax 45 89 02 29

Email: info@dk.LRmed.com