

Metalline® - kompres



kompres med tyndt aluminiseret vlies. Smidigt, sikrer ro til såret. Klæber ikke til såret.

Produktet:

Metalline-kompressets sårdek-kende, matglinsende side er et porøst, blødt vliesstofslør, hvis fibre er overtrukket med et tyndt aluminiumslag. Denne meget glatte overflade klæber ikke til såret.

Sårsekreter optages straks i kompressets absorberende del, hvorved sårrensningen intensiveres. Den aluminiumspådampede vlies og absorptionslaget er fast forbundet med hinanden og har god luft- og vanddampgennemtrængelighed.

Metalline-kompresser er sterile hhv. Kan steriliseres (Autoklav 121°C).

Anvendelsesområde:

Kompresserne er velegnede til afdækning af alle typer sår inden for traumatologien, kirurgien, dermatologien og flebologien.

Metalline applikeres med den glinsende side mod såret og fikseres under pres. Pudder eller fedtsalver hindrer sekretabsorptionen og bør undgås.

Da Metalline-kompresser ikke klæber til såret, er forbindelsesskift smertefri og skånsom, hvilket har positiv indflydelse på helingsprocessen.

Fikser kompresset med et gazebind evt. et selvhæftende. Kompresset kan sidde i op til flere dage, alt efter sårets tilstand.

Sortiment:

Metalline-kompresser

steril,
enkeltvis indpakket
med steriliseringsindikator

<u>Æsker á 10 stk.</u>	<u>art.</u>
8 x 10 cm	23083
10 x 12 cm	23084

dispenser á 50 stk.

8 x 10 cm	23081
10 x 12 cm	23082
10 x 20 cm	23087

ruller i foliepose
usterile

10 cm x 5 m	23080
-------------	-------