

Cellona® gipsbandager



Uovertruffen fincremet

Produktet:

Gipsmasse af fineste α - og β -halv-hydrat, fikseret på 17-trådet gaze og forarbejdet til færdige gipsbind.

Cellona gipsbind gennemfugtes hurtigt og ensartet ved dypning i vand i kort tid. Gipsen er uovertruffen fincremet og er nem at modellere. Gennemhærdede Cellona bandager har en høj brudstyrke, har en glat overflade og er gennemtrængelige for røntgenstråler.

Lohmann & Rauscher A/S
Gøngehusvej 252
DK-2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 02 25
Fax 45 89 02 29
Mail info@dk.LRmed.com

Anvendelse:

Den korrekte vandtemperatur for dypning af bindene ligger mellem 20° til højst 25° C. Bindet fattes med let hånd og dyppes skråt helt ned i vandet. Vandet trykkes ud igen med let hånd.

Dyppetider:

2 meter bind = ca. 2 sekunder

3 meter bind = ca. 3 sekunder

Tørretiden

andrer ca. 3½ minut ved en anvendt vandtemperatur på 20° C.

Let belastning og transport kan ske efter 30 minutters forløb.

Cellona-gipsbandager er velegnede til fisering efter frakturer såvel som knogle- og ledoperationer, ved ortopædisk korrigering, ved behandling af knogle- og led-sygdomme samt ved flegmonøse betændelses tilstande i bløddele.

Gipsbindende kan ligeledes anvendes i forbindelse med modellering af figurer, masker etc.

Sortiment:

Cellaona gipsbind

ligger i pakning á 5 stk.
 2 m bind

	for.kart.	art.
6 cm	60	25400
8 cm	60	25401
10 cm	40	25402
12 cm	40	25403
15 cm	40	25404
20 cm	40	25405

ligger i pakning á 5 stk.
 3 m bind

	fors.kart.	art.
8 cm	40	25411
10 cm	40	25412
12 cm	40	25413
15 cm	40	25414
20 cm	30	25415