

Revamil[®] Balm

100 % ren medicinsk honning med et højt enzymindhold



Produktet:

Revamil Balm er hudvenlig og egner sig især til af behandling af akutte sår, inficerede sår i alle sårfaser, kroniske sår, mindre overfladiske sår som f.eks. hudafskrabninger, snitsår, overfladiske brandsår og ved hudkløe & -irritation.

Revamil Balm kan anvendes både i den professionelle sårbehandling og til førstehjælp i hjemmet.

En tube Revamil Balm indeholder 15 g

Holdbarhed efter åbning 3 måneder.

Anvendelse:

Revamil Balm kan anvendes til inficerede sår, overfladiske sår, kroniske sår og akutte sår.

- Rens såret efter behov
- Påfør et tyndt lag Revamil Balm og forbind efter behov
- Gentag behandlingen med Revamil Balm maks. 3 gange om dagen

Sortiment:

Steril, pakket enkeltvis

Størrelse	Antal	REF
15 g	1	10 500