

## Revamil® Gel

100 % ren medicinsk honning med et højt enzymindhold



### Produktet:

Revamil Gel indeholder 100% ren medicinsk honning, der giver en effektiv og langvarig antibakteriel virkning.

En langsom frigivelse af små mængder hydrogenperoxid gør Revamil Gel særlig egnet til inficerede sår.

Holdbarhed efter åbning 3 måneder.

### Anvendelse:

Revamil kan anvendes til inficerede sår, dybe sår, kroniske sår og akutte sår.

- Rens såret efter behov
- Påfør et tyndt lag Revamil Gel og forbind såret på vanlig vis.
- Vælg sekundær forbinding efter sårets beskaffenhed
- Gentag behandlingen med 1-3 dages interval

### Sortiment:

Steril

#### Størrelse

5 g  
18 g

#### Antal

27  
1

#### REF

10 010  
10 100