



DEN EFFEKTIVE ANTIMIKROBIELLE SKUMBANDAGE

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift^{1,2}
- Hurtig og vedvarende antimikrobiel virkning³
- Nænsom vedhæftning og meget behagelig at have på
- Sikker fiksering, bliver på plads og kan klippes til

Safetac® lag


- Reducerer smerte og traume før, under og efter bandageskift¹
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den tørre omkringliggende hud
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration⁴

Absorberende skumpude

- Absorberer eksudat
- Velegnet til brug under kompression
- Formbar

Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt
- Bakterie- og virusbarriere*

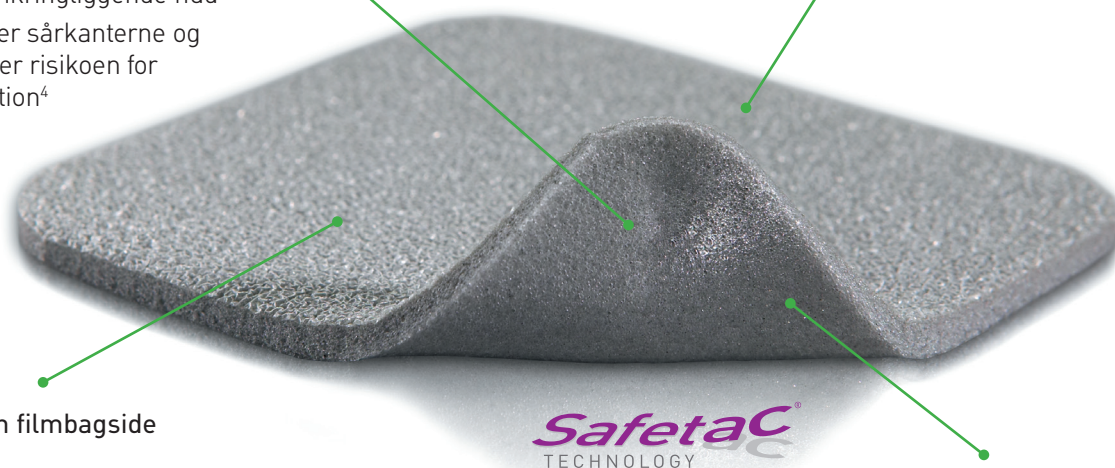

Antimikrobiel effekt

- Antimikrobiel virkning indenfor 30 minutter og op til 7 dage³


Safetac® teknologi

Bemærk: Mepilex Ag behøver ikke at klippes til så den passer såret, når kompression anvendes


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

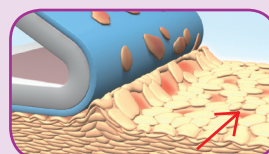


Stripping af hudceller med traditionel klæb

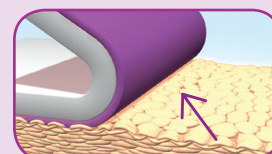


Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi

* Mikrober større end 25 nm


Sådan anvendes Mepilex® Ag

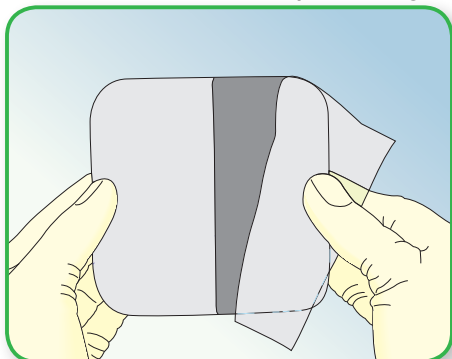

Rens såret efter normal procedure.
Fjern beskyttelsesfilmen.

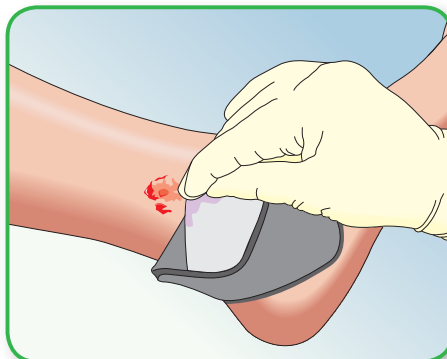

Mepilex Ag skal overlape sårlejet med mindst 2 cm på den omkringliggende hud. Applicer den klæbende side af bandagen mod såret. Stræk ikke bandagen.

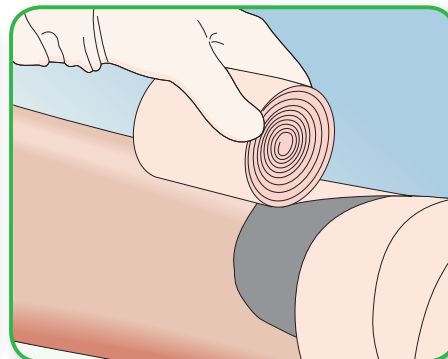

Hvis nødvendigt kan Mepilex Ag fikseres med tape, tubebandage (f.eks. Tubifast 2-Way Stretch) eller anden fiksering.

Sådan virker Mepilex Ag

Mepilex Ag er en blød og meget formbar skumbandage, der absorberer væske og bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud, og minimerer risikoen for maceration. Safetac laget sikrer, at bandagen kan skiftes uden at beskadige såret eller den omkringliggende hud og mindsker derved smerte hos patienten.

Mepilex Ag inaktiverer sårrelaterede patogener indenfor 30 minutter og opretholder effekten i op til 7 dage. Ved at reducere antallet af mikroorganismer kan Mepilex Ag mindske lugtgener.

Fordele ved Mepilex Ag

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Frigør begge hænder til applicering af kompressions- eller fikseringsbandager
- Velegnet til brug under kompression
- Kan klippes til, så den passer til forskellige sårstørrelser og områder, der er vanskelige at bandagere
- Er behagelig for patienten ved brug
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex Ag er udviklet til behandling af let til moderat væskende sår som ben- og fodsår, tryksår og delhudsforbrændinger. Mepilex Ag kan også anvendes under kompression.

Forbehold

- Anvend ikke på patienter med allergi for sølv
- Anvend ikke Mepilex Ag under strålebehandling eller undersøgelser f.eks. røntgen, ultralyd, diatermi eller MR-scanning
- Anvend ikke Mepilex Ag sammen med itlningsmidler som hypoklorit opløsninger eller brintoverilte



MEPILEX AG SORTIMENT (sterilt pakket)

Art. Nr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
287110	10 x 10	5	70
287210	10 x 20	5	45
287310	15 x 15	5	35
287410	20 x 20	5	25
287510	20 x 50	2	12

MEPILEX HEEL AG SORTIMENT

388100	13 x 20	5	25
388300	15 x 22	5	30