


● Mepore® Film & Pad

Åndbar, transparent selvklæbende og absorberende filmbandage.

Mepore Film & Pad er en transparent, selvklæbende og absorberende filmbandage. Appliceringssystemet er designet, så det er enkelt at anvende. Det diskrete design tiltrækker mindre opmærksomhed omkring såret, hvilket får patienten til at føle sig mere bekvem ved at anvende det.

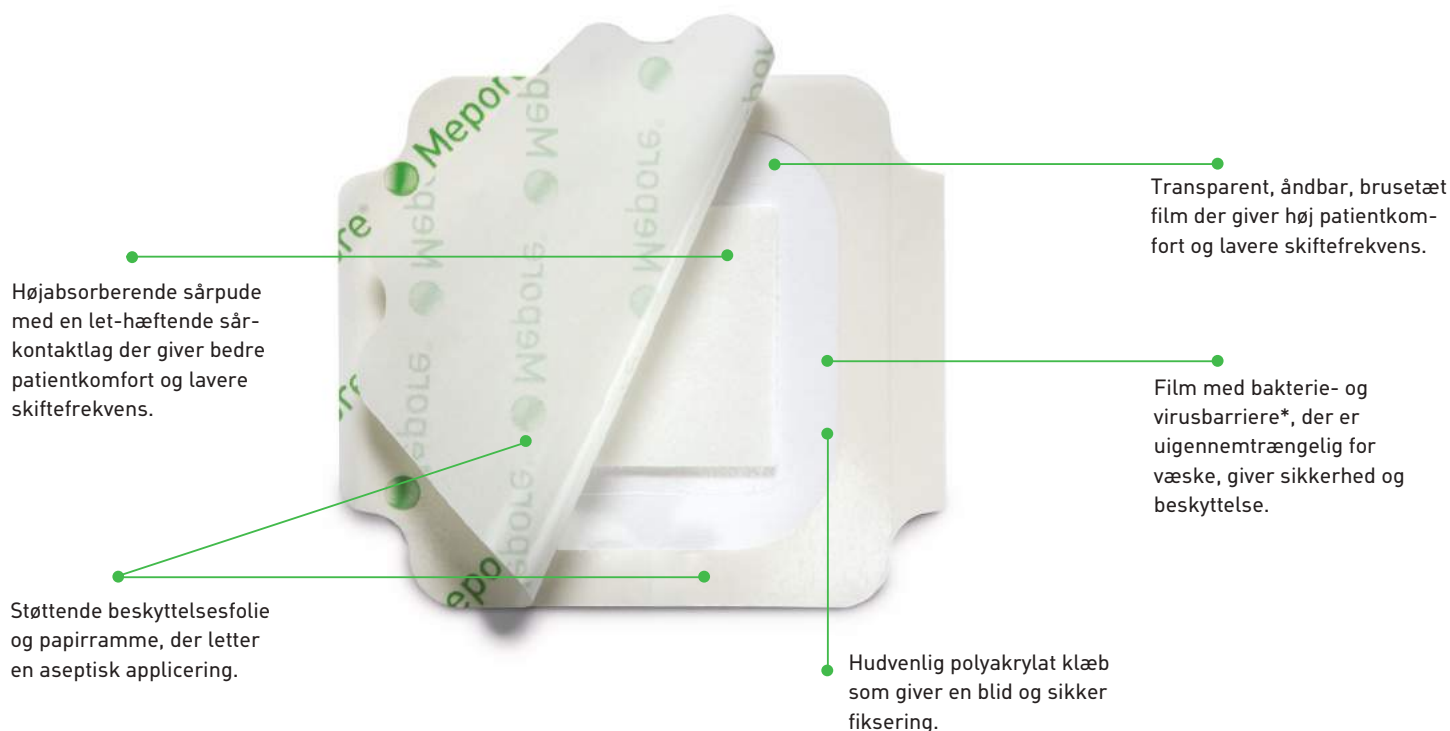

* Mikrober større end 25 nm

Sådan fungerer Mepore Film & Pad

Bandagen har en høj absorberende pude og åndbar film, som sikrer en meget god væskehåndtering. Mepore Film & Pad giver en transparent beskyttelse af såret, er fleksibelt og former sig efter overfladiske ujævnheder og kroppens konturer.

Polyakrylat klæb er blid mod huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Mepore Film & Pad bandager er lette at anvende og skifte aseptisk, også ved brug af handsker.

Anvendelsesområder

Mepore Film & Pad kan anvendes på en række af sår, som har let til moderat væskniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, rifter og hudafskrabninger.

Sådan anvendes Mepore Film & Pad



Fjern beskyttelsesfilmen. Placer bandagen på huden uden at strække i det.



Fjern papirrammen og de to hvide papirsideflapper.



For at sikre optimal klæb til huden, anbring hånden over bandagen i et par sekunder.

Skiftfrekvens

Skiftfrekvensen afhænger af sårets tilstand. Ved tegn på infektion skal den fortsatte anvendelse af Mepore Film & Pad vurderes af fagpersoner.

Fordele ved Mepore Film & Pad

- Lethæftende sårkontaktlag
- Høj åndbarhed
- God væskehåndtering
- Let at applicere også med handsker
- Former sig let efter kroppens konturer
- Bakterie- og virusbarriere, der danner en barriere mod lækage
- Blid og sikker fiksering
- Hudvenlig klæb
- Tillader brusebad

Forholdsregler

Mepore Film & Pad bør ikke appliceres på patienter, der er overfølsomme overfor klæbemidler af akryl. Udvis forsigtighed ved fjernelse af produktet for at minimere risiko for mekanisk skade på huden. Dette gøres ved at tage fat i kanterne og strække bandagen horisontalt.

Mepore Film & Pad er pakket sterilt og i enkelte pakninger

Art. nr	Str. cm.	Sårpude cm.	Stk./inderkrt	Stk./trp.krt.
275100	4x5	1,5x2,5	85	340
275200	5x7, oval	2,5x4	85	340
275300	5x7	2,5x4	85	340
275400	9x10	4,5x5	30	180
275500	9x15	4,5x10	30	240
275600	9x20	4,5x15	30	240
275700	9x25	4,5x20	30	150
275800	9x30	4,5x25	25	125
275900	9x35	4,5x30	25	100
275110	4x5	1,5x2,5	5	70
275210	5x7, oval	2,5x4	5	70
275310	5x7	2,5x4	5	70
275410	9x10	4,5x5	5	50
275510	9x15	4,5x10	5	50
275610	9x20	4,5x15	5	40



Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf. 48 168 268
www.molnlycke.dk



Mölnlycke Health Care navn og logo Mepore® Film&Pad er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.