




HØJ ABSORBERENDE ANTIMIKROBIEL ALGINATBANDAGE

- God absorption til kraftigt væskende dybe og overfladiske sår
- Har en vedvarende antimikrobiel effekt
- Høj fiber styrke som muliggør fjernelse af produktet i ét stykke

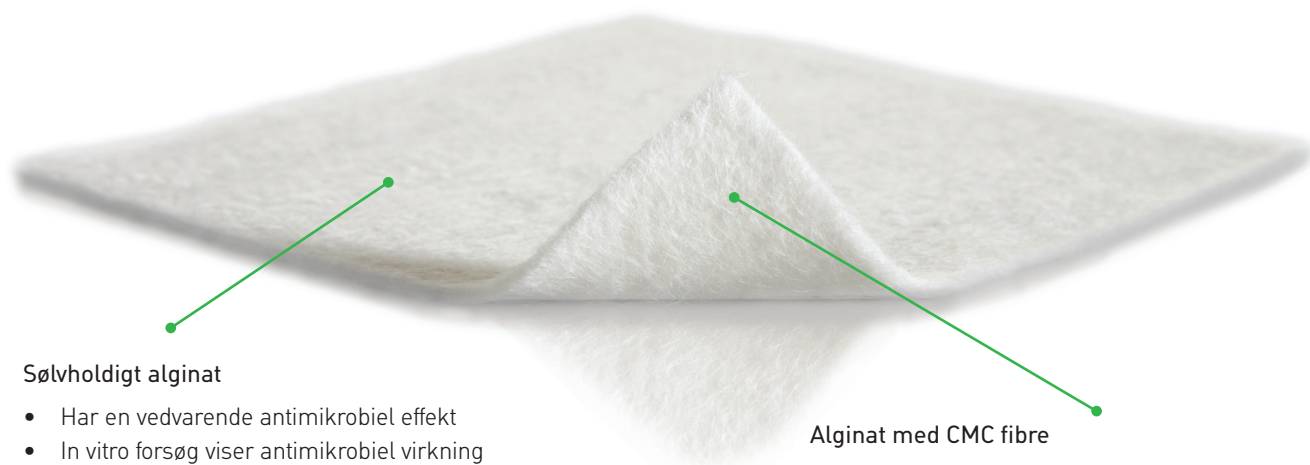


Sølvholdigt alginat

- Har en vedvarende antimikrobiel effekt
- In vitro forsøg viser antimikrobiel virkning fra 4 timer op til 21 dage


Alginat med CMC fibre

- God absorption- til kraftigt væskende sår
- Høj fiberstyrke- muliggør fjernelse i ét stykke
- Konstrueret til overfladiske og dybe sår


Sådan anvendes Melgisorb Ag

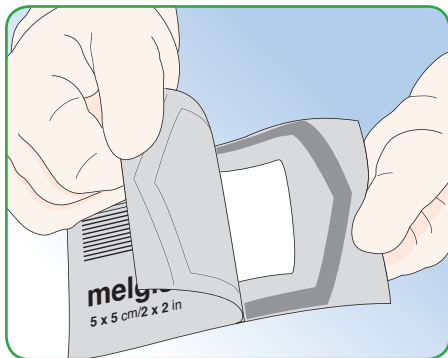

Debrider og skyl såret og den omkringliggende hud i overensstemmelse med standardprocedure. Vælg Melgisorb Ag i en størrelse, der er lidt større end såret. Klip, eller fold bandagen, så den passer til såret.

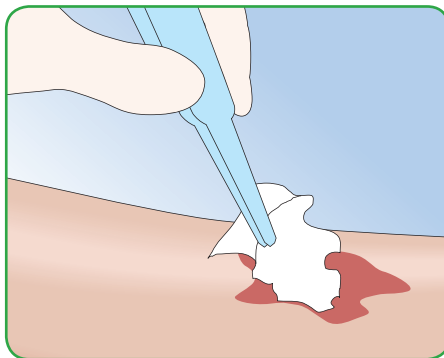

Udfyld løst dybe sår, vær opmærksom på at bandagen ikke går ud over sårkanterne. Læg bandagen direkte på såret.

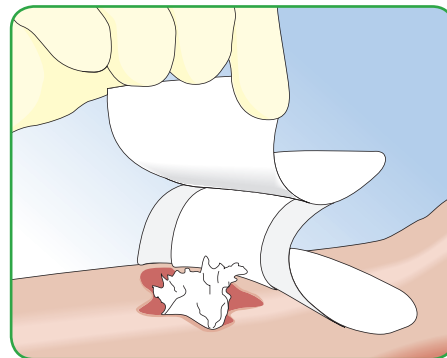

Dæk og fastgør Melgisorb Ag med en sekundær bandage. Hvis såret virker tørt, fugt bandagen med almindeligt vand/sterilt saltvand inden fjernelsen. Fjern forsigtigt bandagen fra såret. Skyl såret i overensstemmelse med standardproceduren, før en ny bandage appliceres.

Anvendelsesområder

Melgisorb Ag kan anvendes til behandling af moderat til kraftigt væskende sår, som:

- postoperative kirurgiske sår
- traumesår (hudlæsioner, akutte sår eller incisioner)
- bensår
- tryksår
- diabetiske sår
- transplantat- og donorsteder
- overfladiske og delhudsforbrændinger

Dette produkt kan også anvendes under kompressionsbandager. Da Melgisorb Ag indeholder alginat, kan produktet være med til at kontrollere mindre blødninger i overfladiske sår. Melgisorb Ag kan anvendes ved behandling af inficerede sår eller sår, hvor der er øget risiko for infektion, under professionel overvågning. Melgisorb Ag anvendes udelukkende til udvortes brug.

Bemærk

Melgisorb Ag kan blive siddende på i op til 7 dage. Skift af bandagen afhænger af sårets tilstand og eksudatniveau. I starten kan det være nødvendigt at skifte bandagen efter et døgn. Hvis såret virker tørt, fugt bandagen med almindeligt vand/sterilt saltvand inden fjernelsen. Fjern forsigtigt bandagen fra såret. Skyl såret i overensstemmelse med standardproceduren, før en ny bandage appliceres.

Kontraindikationer

Melgisorb Ag bør ikke anvendes ved følgende indikationer:

- til personer med kendt overfølsomhed over for alginater eller sølv
- på kirurgiske implantater
- for at kontrollere kraftig blødning
- til direkte applicering på tørre eller let væskende sår

Forholdsregler

- Bandagen kan klæbe, hvis den bruges på tørre eller meget let væskende sår. Hvis bandagen klæber og er svær at fjerne, kan man fugte den med sterilt saltvand, før den fjernes.
- Der kan være risiko for at bandagen virker dårligere, hvis der benyttes oliebase salver.
- Undgå kontakt med elektroder eller ledende geler under elektroniske målinger, f.eks. elektrokardiogrammer (EKG) og elektroencefalogrammer (EEG).
- Bandagen skal fjernes, før MR-scanning (Magnetic Resonance Imaging).
- I tilfælde af klinisk infektion erstatter sølvbandage ikke behovet for systemisk behandling eller anden passende infektionsbehandling.

Sortiment (sterilt pakket)

Art. nr	Størrelse cm	Stk. inderkrt./trp.krt.
256050	5 × 5	10/100
256100	10 × 10	10/100
256150	15 × 15	10/100
256600	3 × 44	10/100



Mölnlycke Health Care ApS
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf. 48 168 268
www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care navn og logo og Melgisorb Ag er registrerede varemærker som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

