




# Appliceringsguide

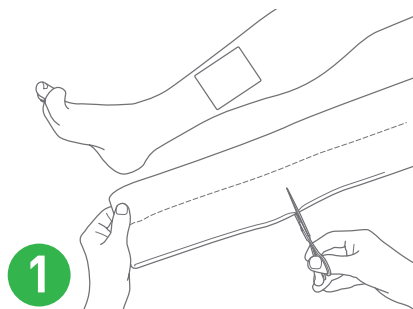

Tubifast 2-Way Stretch er en elastisk, bekvem tubebandage, der kan anvendes til fiksering af bandager på dermatologiske områder eller som strømpe under en gipsbandage. For at applicere Tubifast 2-Way Stretch behøves kun en saks og et par hænder. Klip den til i den ønskede længde.

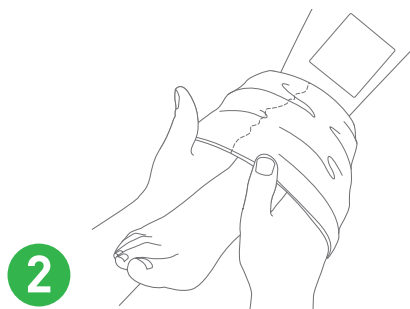


Stræk Tubifast 2-Way Stretch hen over hænderne og over skadeområdet, hvis bandagen skal fastgøres. Hvis der er behov for at hele skadeområdet skal dækkes, træk eller rul Tubifast 2-Way Stretch på som en strømpe.

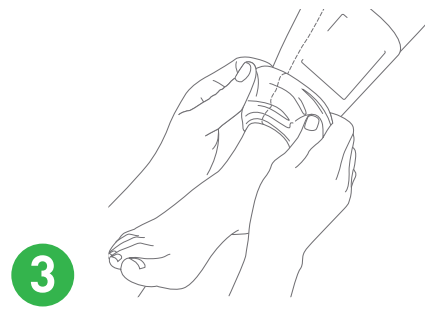


Tubifast 2-Way Stretch dækker bandagen og strammer ikke. Det må gerne appliceres som et dobbelt lag, især hvor der er behov for ekstra sikkerhed, eller hvis kanterne skal tages ind under. Lige meget hvilken metode der bliver anvendt, er Tubifast 2-Way Stretch hurtig, let og bekvem - den bliver på plads og uden at stramme.

## Hånd applicering

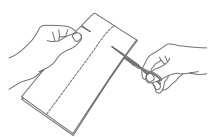

1 Mål fra mellemhånden til lige under håndleddet. Klip 2 huller omkring 5 cm. fra folden.

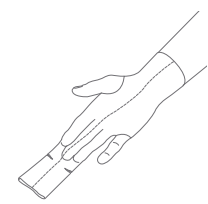


2 Træk Tubifast 2-Way Stretch hen over hånd og håndled, med tommelfingeren og lillefingeren som skal ud igennem de allerede lavede huller.



3 Resten af bandagen foldes tilbage over hånden og de tre midterste fingre bliver frie. Bandagen er nu sikret.


## Vest applicering

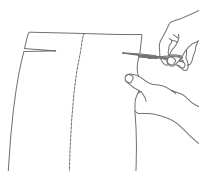

1 Tag en Tubifast 2-Way Stretch krops bredde og mål fra toppen af skuldren til taljen. Klip huller omkring 10 cm. nede, og 4-5 cm. i bredden i begge sider.




2 Træk Tubifast 2-Way Stretch over hovedet og stik armene ud igennem de huller der er blevet lavet.

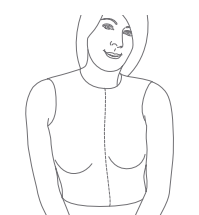


3 Tubifast 2-Way Stretch er trukket på, så den fungerer som en vest. Denne applicering er ideel til at holde bandager på brystet eller ryg på plads, og til dermatologisk anvendelse.


## Vest med ærmer

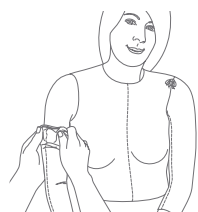

1 Krops bredden er appliceret som i foregående applicering og et stykke af Tubifast 2-Way Stretch arm bredde rulles på ærmene.

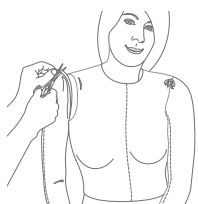


2 Der laves et klip under og over ærmen for at skabe to strimler i ærme stykket. Huller laves foran og bagpå vesten for at sikre strimlerne.

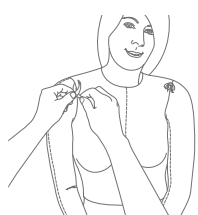

3 Strimlerne trækkes igennem hullerne i Tubifast 2-Way Stretch krops bredde og bindes, for at skabe en ideel ærmet vest til dermatologi eller under en gipsbandage.


## Hofte bandage

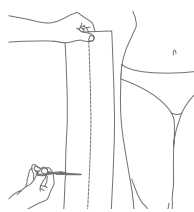

1 Mål et stykke helkrops Tubifast 2-Way Stretch fra hofte til lår og klip et hul omtrent 15 cm. nede.




2 Træk Tubifast 2-Way Stretch hen over det skadede ben og det raske ben tages igennem det klippede hul.

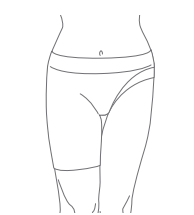


3 Tubifast 2-Way Stretch holder nu bandagen sikkert på hofte regionen.


## Hoved applicering

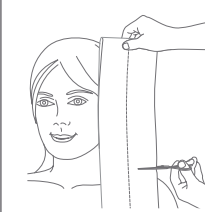

1 Mål fra nakke til toppen af hovedet og bøj sammen. Tag lidt ekstra (3-4 cm.) og klip. Fold den til i to lige store halve og klip et hul 5-6 cm. oppe, 2-3 cm. inde.

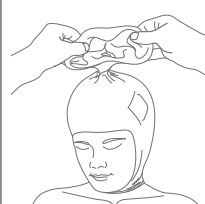


2 Træk den hen over hovedet med ansigtet ud af hullet. Sno den resterende bandage rundt om sig selv og træk tilbage hen over hovedet igen.

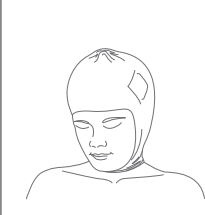


3 Hoved bandagen er nu fuldstændt og bandagen bliver holdt sikkert på plads.


## Perinæum bandage

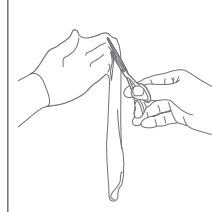

1 Mål fra talje til midten af låret og klip et hul halvejs igennem Tubifast 2-Way Stretch omtrent 15 cm. oppe.

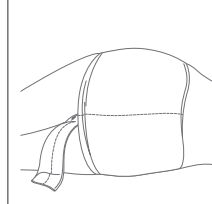

2 Tubifast 2-Way Stretch trækkes op, med begge ben gennem hullet og med strimlen bagpå.

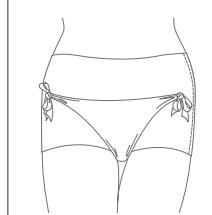

3 Strimlen tages i mellem benene og der klippes huller i krops bredden. De to ender af strimlen trækkes igennem hullet og bindes. Sikrer at perinæum bandagen bliver på plads.

## Tubifast 2-Way Stretch er pakket enkeltvis

| Produkt                           | Art. Nr. | Omkreds  | Bredde x længde | Stk/ inderkrt. | Stk/ trp.krt. |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>RØD</b>                        | 2480     | 8-15 cm  | 3,5 cm x 1 m    | 12             | 144           |
| Små ekstremiteter                 | 2434     | 8-15 cm  | 3,5 cm x 10 m   | 1              | 48            |
| <b>GRØN</b>                       | 2481     | 10-25 cm | 5 cm x 1 m      | 12             | 144           |
| Små og mellem-store ekstremiteter | 2436     | 10-25 cm | 5 cm x 10 m     | 1              | 42            |
| <b>BLÅ</b>                        | 2482     | 20-45 cm | 7,5 cm x 1 m    | 12             | 96            |
| Store ekstremiteter               | 2438     | 20-45 cm | 7,5 cm x 10 m   | 1              | 30            |

| Produkt                                               | Art. Nr. | Omkreds   | Bredde x længde | Stk/ inderkrt. | Stk/ trp.krt. |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>GUL</b>                                            | 2483     | 35-65 cm  | 10,75 cm x 1 m  | 12             | 96            |
| Ekstra store ekstremiteter, hoveder, helkrop til børn | 2440     | 35-65 cm  | 10,75 cm x 10 m | 1              | 18            |
| <b>LILLA</b>                                          | 2479     | 60-130 cm | 20 cm x 1 m     | 12             | 72            |
| Stor helkrop, voksne                                  | 2444     | 60-130 cm | 20 cm x 10 m    | 1              | 20            |



<sup>1</sup> Publicerede data viser, at Tubifast 2-Way Stretch overgår minimumskravet for stræk, fleksibilitet og smidighed.

Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.

<sup>2</sup> Data på fil.