



SPONGOSTAN®

Resorberbart hæmostatikum

Produktbeskrivelse:

SPONGOSTAN®

- **Gelatinebaseret** hæmostatikum. Materialet består af tørret gelatineskum.
- **Neutral pH-værdi.** Bevirker at den kan anvendes som bærer af lægemidler.
- **Svulmer ikke op.** Kan efterlades in situ og absorberer 45 gange sin egen vægt.
- **Stopper blødningen inden for 2-10 minutter.**
- **Resorberes fuldstændigt efter 4-6 uger.** Uden ardannelse eller uventede reaktioner.

Anvendelsesområde:

SPONGOSTAN® anvendes til at kontrollere diffuse kapillære, venøse og mindre arterielle blødninger på steder, hvor ligatur, sutur eller anden hæmostatisk procedure er svær eller upraktisk at anvende.

Brugsanvisning:

SPONGOSTAN® kan anvendes tør eller fugtet i fysiologisk saltvand, som vrides ud inden applicering. Tryk SPONGOSTAN® let mod det blødende område i et lille stykke tid, indtil blødningen er ophørt. SPONGOSTAN® kan klippes til i den ønskede størrelse eller form uden at fragmentere. Hvis SPONGOSTAN® appliceres i tør tilstand, bør den presses sammen sammen applicering på det blødende område.

Kontraindikationer:

- for tæt pakning af SPONGOSTAN® bør undgås.
- hvis SPONGOSTAN® anvendes hvor der er infektion, skal SPONGOSTAN® fjernes efter at blødningen er ophørt.

Steriliseringsmetode: Tørluftsterilisering

Holdbarhed: 4 år ved stuetemperatur. Opbevares tørt. MÅ IKKE RESTERILISERES.

Art nr	Størrelse	Antal st/ afd.pakn.	Mindste salgsenhed, stk.
MS0001	FILM, 200x70x0,5 mm	20	20
MS0002	STANDARD, 70x50x10 mm	20	20
MS0003	SPECIAL, 75x50x1 mm	20	20
MS0004	ANAL, 80x30 mm	20	20
MS0005	DENTAL, 10x10x10 mm	24	24
MS0008	POWDER, 1 gram pr. container	6	6