

Actilite®

Sårkontaktlag med 99% steril medicinsk Manuka honning og 1% Manuka olie

Produktbeskrivelse

Actilite sårkontaktlag (viskosenet) er tilsat 99% ren Manuka honning og 1 Manuka olie. Manuka honning har en kendt antibakteriel, antiinflammatorisk og helende effekt på sår. Actilite beskytter såret og fremskynde healing, samtidig med at sårsekret kan passere gennem bandagen. Actilite anvendes til overfladiske sår, for at reducere bakteriel vækst, samt ved negativ trykbehandling (NPWT).

Sårhelingsfordele

- Antibakteriel og antiinflammatorisk
- Osmotisk effekt rensar beskadiget og dødt væv
- Skaber et fugtigt sårhelingsmiljø
- Fjerner lugte fra ildelugtende sår
- Tilpasser sig sårets former
- Effektiv mod sårindtrængende bakterier, herunder: *Staphylococcus aureus*, *pseudomonas aeruginosa*, antibiotika-resistent MRSA og VRE.



Indikation

- Granulerede og epitaliserede sår
- Kraftigt inficerede sår, sår med dødt væv
- Som primærbandage, hvor man ønsker en antibakteriel beskyttelse
- Kan bruges sammen med Activon Tube honningsalve

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor bigift/honning.

Brugsanvisning

Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm og læg bandagen direkte på såret. Det har ingen betydning hvilken side af bandagen, der lægges mod såret. Kan klippes til eller formes efter behov. Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat. Actilite kan forblive i såret i op til 7 dage.



Varenr.	Produkt	Størrelse	Antal pr. æske / karton
MF1000010	Actilite	5 x 5 cm	10 / 400
MF1000008	Actilite	10 x 10 cm	10 / 540
MF1000009	Actilite	10 x 20 cm	10 / 270