

Activon Tube®

Tube med 100% steril medicinsk Manuka honning

Produktbeskrivelse

Activon® Tube er Manuka honning af 100 % medicinsk kvalitet, som har en kendt antibakteriel og helende virkningsgrad. Ud over dets antibakterielle egenskaber har Activon Tube flere fordele: det har en osmotisk virkning, der hjælper med at debridere og fjerne dødt væv fra sår, det reducerer lugt og opretholder et fugtigt sårhelingsmiljø. Kan anvendes på alle typer sår i alle faser.



Sårhelingsfordele

- Antibakteriel og antiinflammatorisk
- Lav pH-værdi (3,2-4,5) skaber et sårhelende miljø, hvor bakterier ikke trives
- Osmotisk effekt renser beskadiget og dødt væv
- Debriderer og oprenser urene sår
- Skaber et fugtigt sårhelingsmiljø
- Fjerner lugte fra ildelugtende sår
- Effektiv mod sårindtrængende bakterier, herunder: *Staphylococcus aureus*, *pseudomonas aeruginosa*, antibiotika-resistent MRSA og VRE.

Indikation

- Tryksår
- Bensår
- Diabetessår
- Kirurgiske sår
- Brandskader
- Sår med dødt væv
- Dybe sår, fistelgange
- Kraftigt inficerede sår

Kontraindikationer

Kendt allergi overfor bigift/honning.

Brugsanvisning

Skru låget af og påfør rigeligt Manuka honning direkte i såret. Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat. Kan bruges i op til 90 dage efter anbrud.



Varenr.	Produkt	Størrelse	Antal pr. æske / karton
MF1000003	Activon Tube	25g	12 / 240