

# Activon Tulle®


Gazekompres med 100% steril medicinsk Manuka honning

## Produktbeskrivelse

Activon Tulle gazekompres er imprægneret med 100% Manuka honning. Manuka honning har en kendt antibakteriel, antiinflammatorisk og helende effekt på sår. Anvendes direkte på alle typer sår i alle faser. Anbefales til moderat til kraftigt væskende sår samt ved kompressionsbehandling.

## Sårhelingsfordele

- Antibakteriel og antiinflammatorisk
- Lav pH-værdi (3,2-4,5) skaber et sårhelende miljø, hvor bakterier ikke trives
- Osmotisk effekt renser beskadiget og dødt væv
- Debriderer og oprenser urene sår
- Skaber et fugtigt sårhelingsmiljø
- Fjerner lugte fra ildelugtende sår
- Tilpasser sig sårets former
- Effektiv mod sårindtrængende bakterier, herunder: *Staphylococcus aureus*, *pseudomonas aeruginosa*, antibiotika-resistent MRSA og VRE.

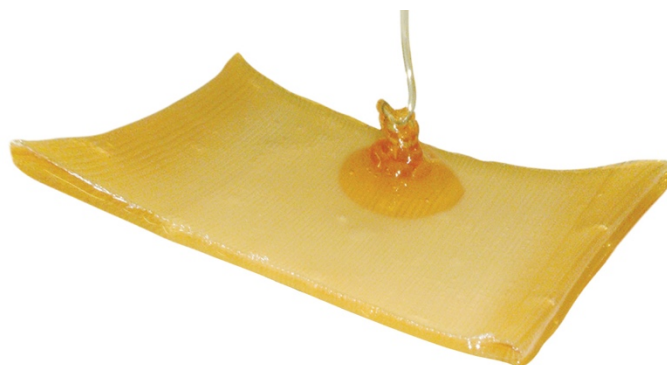

## Indikation

- Tryksår
- Bensår
- Diabetessår
- Cancersår
- Nekrotiske sår
- Kraftigt inficerede sår, sår med dødt væv

## Kontraindikationer

Kendt allergi overfor bigift/honning.

## Brugsanvisning

Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm og læg bandagen direkte på såret. Det har ingen betydning hvilken side af bandagen, der lægges mod såret. Kan klippes til eller formes efter behov. Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat. Activon Tulle kan forblive i såret i op til 7 dage.



| Varenr.   | Produkt       | Størrelse  | Antal pr. æske / karton |
|-----------|---------------|------------|-------------------------|
| MF1000001 | Activon Tulle | 5 x 5 cm   | 5 / 280                 |
| MF1000002 | Activon Tulle | 10 x 10 cm | 5 / 280                 |